

Ziocompact

ENVASES PARA RESIDUOS DE RIESGO
CONTENTORES CORTO-PERFORANTES
PARA RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGROSOS



+

CONVENIENTE

+

MODERNO

+

ERGONÓMICO

+

FUNCIONAL



ISO 9001:2008

Ziocompact

ENVASES PARA RESIDUOS DE RIESGO
CONTENTORES CORTO-PERFORANTES
PARA RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS

CAPACIDADES CAPACIDADES	3
VENTAJAS TAPA NUEVA VANTAGENS DA NOVA TAMPA	4
INSTRUCCIONES GENERALES INSTRUÇÕES GERAIS	5
USO CORRECTO DE LA TAPA USO CORRETO DA TAMPA	6
LÍMITE DE LLENADO LIMITE DE ENCHIMENTO	7
PERSONALIZACIÓN DE LA ETIQUETA PERSONALIZAÇÃO DA ETIQUETA	8
SOPORTE DE MESA SUPORTE DE MESA	9
SOPORTE DE BARRA / PARED SUPORTE DE BARRA / PAREDE	10
BANDEJA BANDEJA	11
DATOS TÉCNICOS DADOS TÉCNICOS	12
LOGÍSTICA LOGÍSTICA	13
LOGÍSTICA - ACCESORIOS LOGÍSTICA - ACESSÓRIOS	14

Biocompact

ENVASES PARA RESIDUOS DE RIESGO
CONTENEDORES CORTO-PERFORANTES
PARA RESIDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS



1,8 Litros



3 Litros



5 Litros



10 Litros

Biocompact

ENVASES PARA RESIDUOS DE RIESGO
CONTENTORES CORTO-PERFORANTES
PARA RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS

VENTAJAS TAPA NUEVA
VANTAGENS DA NOVA TAMPA




- 1 Tabique asidero que hace que el contenedor Biocompact sea aún más fácil y seguro de manejar ya que permite el accionamiento giratorio de la tapa de forma rápida y segura impidiendo cualquier contacto con el residuo durante su utilización.

Pega que faz com que o contentor Biocompact seja mais fácil e seguro de manobrar e que permite o girar da tampa de forma rápida e segura impedindo qualquer contato com o resíduo durante a sua utilização.

- 2 Nueva forma del riñón del cierre definitivo con alojamiento para los dedos que permite llevar a cabo el cierre definitivo con mayor comodidad.

Novo formato do fecho definitivo com espaço para colocação dos dedos de forma a permitir o encerramento definitivo com maior facilidade.

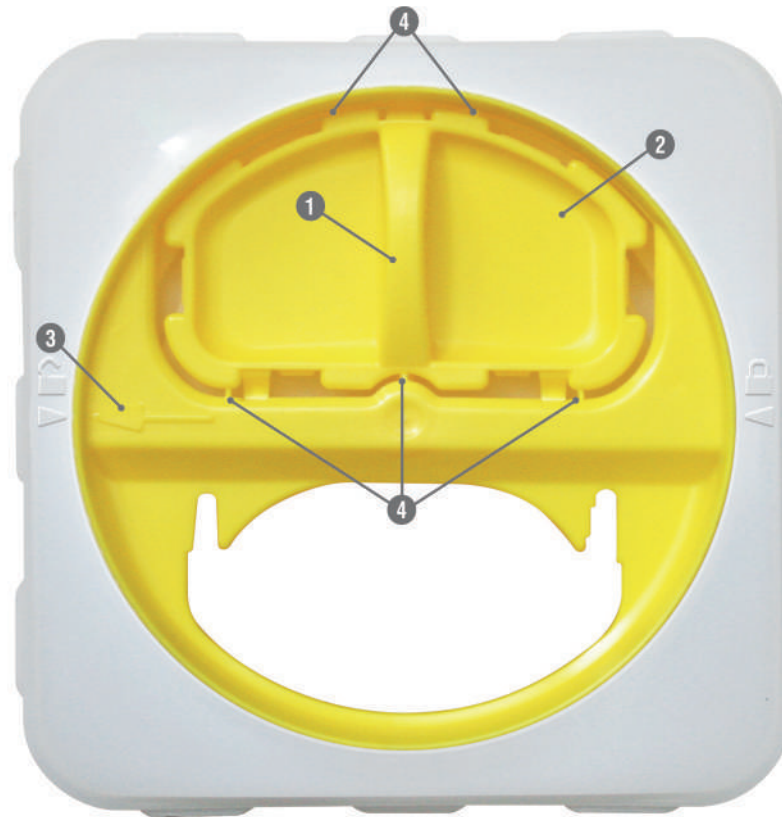

- 3 Flecha indicativa de la posición de la tapa para llevar a cabo el cierre definitivo, facilita la comprobación de que la tapa está en la posición apropiada para llevar a cabo el mismo (🔒🔓)

Seta indicativa da posição da tampa para levar a cabo o encerramento definitivo. Facilmente se comprova que a tampa está na posição correta (🔒🔓)

- 4 Anclajes en el marco del riñón que se rompen mediante la presión realizada al llevar a cabo el cierre definitivo, cuya ruptura asegura el mismo y permite comprobar que se ha realizado correctamente.

Fixações no fecho definitivo que se quebram mediante a pressão realizada para efetuar o encerramento definitivo, cuja rutura assegura o correto encerramento e permite comprovar que este se realizou corretamente.

Ziocompact

ENVASES PARA RESIDUOS DE RIESGO
CONTENEDORES CORTO-PERFORANTES
PARA RESIDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS



MONTAJE MONTAGEM



Alinear la tapa sobre el contenedor. Presionar fuertemente sobre las esquinas del contenedor hasta oír los "clicks" de comprobación

Alinhar a tampa sobre o contedor. Pressionar fortemente sobre as esquinas do contedor até ouvir os "clicks" comprovativos da montagem correta

APERTURA ABERTURA



Girar la parte circular de la tapa en el sentido de las agujas del reloj hasta escuchar "click"

Girar a parte circular da tampa no sentido dos ponteiros do relógio até ouvir "click"

PRECIERRE ENCERRAMENTO TEMPORÁRIO



El cierre provisional se obtiene girando la parte circular de la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj hasta escuchar "click"

Obtém-se o encerramento provisório girando a parte circular da tampa no sentido contrário aos ponteiros do relógio até ouvir "click"

CIERRE DEFINITIVO ENCERRAMENTO DEFINITIVO



Comprobar que la tapa está girada totalmente en sentido contrario a las agujas del reloj hasta escuchar "click" (posición PRECIERRE). A continuación presionar el riñón amarillo en los puntos indicados con ambos pulgares en el orden mostrado en las imágenes hasta escuchar los "clicks" que indican que la tapa ha quedado cerrada definitivamente

Confirmar que a tampa está totalmente rodada, através de rotação no sentido contrário aos ponteiros do relógio até ouvir "click" (posição de ENCERRAMENTO TEMPORÁRIO). Para continuar pressione a parte amarela nos pontos indicados com os dois dedos polegares pela ordem mostrada nas imagens até ouvir os "clicks" que indicam que a tampa ficou encerrada definitivamente

ELIMINACIÓN DE MATERIAL ELIMINAÇÃO DO MATERIAL



Sistema de extracción de agujas y utensilios

Sistema de extração de agulhas e utensilios

SOPORTE DE MESA SUPORTE DE MESA



SOPORTE DE BARRA / PARED SUPORTE DE BARRA / PAREDE



BANDEJA BANDEJA



Ziocompact

ENVASES PARA RESIDUOS DE RIESGO
CONTENTORES CORTO-PERFORANTES
PARA RESIDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS



USO CORRECTO DE LA TAPA
USO CORRETO DA TAMPÁ



APERTURA
ABERTURA



Girar la parte circular de la tapa en el sentido de las agujas del reloj hasta escuchar "clic"
Girar a parte circular da tampa no sentido dos ponteiros do relógio até ouvir "click"

PRECIERRE
ENCERRAMENTO TEMPORÁRIO



Girar la parte circular de la tapa en sentido contrario de las agujas del reloj hasta escuchar "clic"
Girar a parte circular da tampa no sentido contrário aos ponteiros do relógio até ouvir "click"

⚠ CIERRE DEFINITIVO
ENCERRAMENTO DEFINITIVO



1 Comprobar que la tapa está girada totalmente en sentido contrario a las agujas del reloj hasta escuchar "clic" (posición PRECIERRE)

Confirmar que a tampa está totalmente rodada, através de rotação no sentido contrário aos ponteiros do relógio até ouvir "click" (posição de ENCERRAMENTO TEMPORÁRIO)



2 A continuación presionar el riñón amarillo en los puntos indicados con ambos pulgares en el orden mostrado en las imágenes hasta escuchar los "clicks" que indican que la tapa ha quedado cerrada definitivamente

Para continuar pressione a parte amarela nos pontos indicados com os dois dedos polegares pela ordem mostrada nas imagens até ouvir os "clicks" que indicam que a tampa ficou encerrada definitivamente

Ziocompact

ENVASES PARA RESIDUOS DE RIESGO
CONTENTORES CORTO-PERFORANTES
PARA RESIDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS

LÍMITE DE LLENADO
LIMITE DE ENCHIMENTO



⚠ NO FORZAR JAMÁS LA INTRODUCCIÓN DE RESIDUOS
NÃO FORÇAR A INTRODUÇÃO DE RESÍDUOS

⚠ NO SOBREPASAR EL 80% DE LA CAPACIDAD ÚTIL
NÃO ULTRAPASSAR 80% DA CAPACIDADE ÚTIL



▲ LÍMITE DE LLENADO / LIMITE DE ENCHIMENTO ▲

Ziocompact

ENVASES PARA RESIDUOS DE RIESGO
CONTENTORES CORTO-PERFORANTES
PARA RESIDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS



PERSONALIZACIÓN DE LA ETIQUETA
PERSONALIZAÇÃO DA ETIQUETA



Etiqueta personalizada con la información y logotipo de la empresa cliente
Etiqueta personalizada com a informação e logotipo da empresa do cliente




Ziocompact

ENVASES PARA RESIDUOS DE RIESGO
CONTENEDORES CORTO-PERFORANTES
PARA RESIDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS

SOPORTE DE MESA
SOPORTE DE MESA



COLOCACIÓN DE SOPORTE CON VENTOSAS
COLOCAÇÃO DE SUPORTE COM VENTOSAS

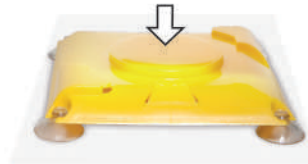

Colocar el soporte presionándolo sobre la superficie para fijarlo a ella
Colocar o suporte pressionando sobre a superfície para fixá-lo

COLOCACIÓN DE SOPORTE CON TORNILLOS
COLOCAÇÃO DE SUPORTE COM PARAFUSOS



Retirar las ventosas
Retirar as ventosas



Colocar los tornillos y ajustarlos hasta fijar el soporte a la superficie
Colocar os parafusos e apertá-los até fixar o suporte à superfície

INSERCIÓN DE CONTENEDOR EN SOPORTE
INSERÇÃO DO CONTENTOR NO SUPORTE



Colocar el contenedor sobre el soporte girando ligeramente hasta que encaje en él
Colocar o conteúdo sobre o suporte rodando ligeiramente até estar encaixado

EXTRACCIÓN DE CONTENEDOR DEL SOPORTE
EXTRAÇÃO DO CONTENTOR DO SUPORTE



Presionar PUSH para liberar el contenedor y girar el contenedor para su extracción
Pressionar "PUSH" até libertar o conteúdo e girá-los para o retirar


Ziocompact

ENVASES PARA RESIDUOS DE RIESGO
CONTENEDORES CORTO-PERFORANTES
PARA RESIDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS



SOPORTE DE BARRA / PARED
SOPORTE DE BARRA / PAREDE

INSTALACIÓN: SOPORTE BARRA
INSTALAÇÃO: SUPORTE DE BARRA

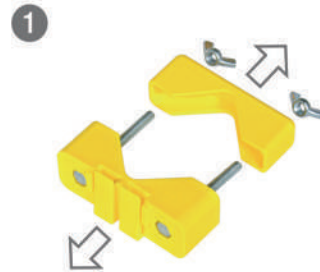

Desenroscar las palomillas para extraer los tornillos y separar las dos piezas del soporte
Desenroscar as porcas para extrair os parafusos das peças do suporte




Colocar ambas piezas en la barra y fijarlo al mismo introduciendo de nuevo los tornillos y fijándolos con las palomillas
Colocar as duas peças do suporte no carro e fixá-lo introduzindo novamente os parafusos e fixá-los com as porcas



Insertar el contenedor en la ranura del soporte habilitada para la sujeción del mismo
Inserir o contentor na ranhura do suporte correspondente




INSTALACIÓN: SOPORTE PARED
INSTALAÇÃO: SUPORTE DE PAREDE

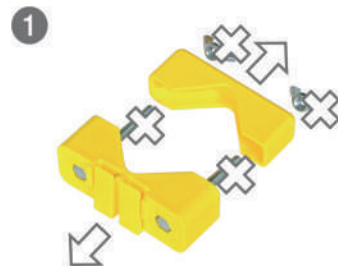


Desenroscar las palomillas para extraer los tornillos y separar las dos piezas del soporte
Desenroscar as porcas para extrair os parafusos das peças do suporte



Atornillarlos hasta que el soporte quede fijo a la pared
Aparafusá-los até que o suporte esteja fixo na parede

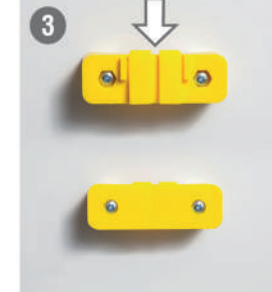

Insertar el contenedor en la ranura del soporte habilitada para la sujeción del mismo
Inserir o contentor na ranhura do suporte correspondente

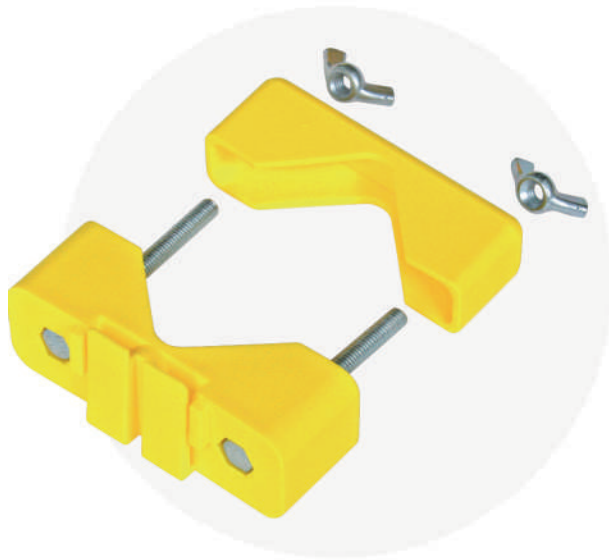

Ziocompact

ENVASES PARA RESIDUOS DE RIESGO
CONTENTORES CORTO-PERFORANTES
PARA RESIDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS

BANDEJA
BANDEJA



INSERCIÓN DEL CONTENEDOR EN LA BANDEJA
INSERÇÃO DO CONTENTOR NA BANDEJA



Colocar el contenedor sobre la bandeja
girando ligeramente hasta que encaje en ella
Colocar o contentor na bandeja girando-o
ligeiramente até ficar encaixado

EXTRACCIÓN DEL CONTENEDOR DE LA BANDEJA
EXTRAÇÃO DO CONTENTOR DA BANDEJA



Girar el contenedor para su extracción de la
bandeja
Girar o contentor para o extrair da bandeja

Biocompact

ENVASES PARA RESIDUOS DE RIESGO
CONTENEDORES CORTO-PERFORANTES
PARA RESIDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS



DATOS TÉCNICOS DADOS TÉCNICOS

PRODUCTO PRODUTO	REF. REF.	MEDIDAS MEDIDAS (cm)	PESO UNITARIO PESO UNITARIO (kg)	CAPACIDAD NOM. CAPACIDADE NOM. (l)	CAPACIDAD ÚTIL CAPACIDADE ÚTIL (l)	CARGA MÁXIMA CARGA MÁXIMA (kg)
BioCompact 1,8L	BC18LATE	15,9 x 15,9 x 12,1	0,24	1,80	1,60	1,00
	BC18LAT					
BioCompact 03L	BC03LATE	15,9 x 15,9 x 19,1	0,28	3,00	2,60	1,50
	BC03LAT					
BioCompact 05L	BC05LATE	22 x 22 x 13	0,38	5,00	3,70	2,00
	BC05LAT					
BioCompact 10L	BC10LATE	21,4 x 21,4 x 24,1	0,51	10,00	7,00	4,00
	BC10LAT					
Bandeja	SPBAN	37,5 x 35 x 26	0,30			
Soporte mesa Suporte mesa	SPMEBCA	1,5 x 18 x 18	0,09			
Soporte barra/pared Suporte barra/parede	SPBABCA	18 x 11 x 3,7	0,07			

Biocompact

ENVASES PARA RESIDUOS DE RIESGO
CONTENEDORES CORTO-PERFORANTES
PARA RESIDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS



LOGÍSTICA

PRODUCTO PRODUTO	REF. REF.	UNID. CAJA UNID. CAIXA	DIMENSIONES CAJA DIMENSÕES DA CAIXA (cm)	PESO CAJA PESO DA CAIXA (kg)	UNID. PALÉ UNID. PALETE	TIPO PALÉ TIPO PALETE	DIMENSIONES PALÉ DIMENSÕES DA PALETE (cm)	PESO PALÉ PESO DA PALETE (kg)
BioCompact 1,8L	BC18LATE	30	35,2 x 34,5 x 51,2	7,05	630	EURO	80 x 120 x 207	163,05
	BC18LAT				900	USA	100 x 120 x 207	226,50
	BC18LAT				1.080	USA MEGA	100 x 120 x 224	268,80
BioCompact 03L	BC03LATE	30	35 x 35 x 55,5	8,25	630	EURO	80 x 120 x 217	188,25
	BC03LAT				900	USA	100 x 120 x 217	262,50
	BC03LAT				1.080	USA MEGA	100 x 120 x 237	312,00
BioCompact 05L	BC05LATE	30	25 x 46,5 x 96	11,40	420	EURO	80 x 120 x 212	175,00
	BC05LATE				510	EURO MEGA	80 x 120 x 254	209,00
	BC05LAT				600	USA	100 x 120 x 212	243,00
	BC05LAT				750	USA MEGA	100 x 120 x 262	303,00
BioCompact 10L	BC10LATE	30	25 x 46,5 x 94,5	11,80	280	EURO	80 x 120 x 205	180,20
	BC10LATE				340	EURO MEGA	80 x 120 x 250	215,60
	BC10LAT				400	USA	100 x 120 x 210	251,00
	BC10LAT				500	USA MEGA	100 x 120 x 259	310,00

Ziocompact

ENVASES PARA RESIDUOS DE RIESGO
 CONTENEDORES CORTO-PERFORANTES
 PARA RESIDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS



LOGÍSTICA - ACCESORIOS LOGÍSTICA - ACESSÓRIOS

PRODUCTO PRODUTO	REF. REF.	UNID. CAJA UNID. CAIXA	DIMENSIONES CAJA DIMENSÕES DA CAIXA (cm)	PESO CAJA PESO DA CAIXA (kg)	UNID. PALÉ UNID. PALETE	TIPO PALÉ TIPO PALETE	DIMENSIONES PALÉ DIMENSÕES DA PALETE (cm)	PESO PALÉ PESO DA PALETE (kg)
Bandeja	SPBAN	22	53,5 x 43,5 x 35,5	6,60	480	EURO	80 x 120 x 231	159,00
					576	EURO MEGA	80 x 120 x 274	187,80
					720	USA	100 x 120 x 231	231,00
					864	USA MEGA	100 x 120 x 274	274,20
Soporte mesa Suporte mesa	SPMEBCA	30	51 x 40,5 x 20,5	2,55	1.980	EURO	80 x 120 x 226	183,30
					2.310	EURO MEGA	80 x 120 x 261	211,35
					2.340	USA	100 x 120 x 226	213,90
					2.730	USA MEGA	100 x 120 x 261	247,05
Soporte barra/pared Suporte barra/parede	SPBABCA	30	19,5 x 19,5 x 22,2	2,82	5.280	EURO	80 x 120 x 208	511,32
					6.930	EURO MEGA	80 x 120 x 268	666,42
					7.200	USA	100 x 120 x 208	691,80
					9.900	USA MEGA	100 x 120 x 268	945,60



Sanypick S.A

C/ Carlos Jiménez Díaz, 23. ES-28806 Alcalá de Henares (Madrid)
+34 91 884 11 86 · info@sanypick.com
www.sanypick.com