

# Ziocompact

ENVASES PARA RESIDUOS DE RIESGO  
CONTENTORES CORTO-PERFORANTES  
PARA RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGROSOS

+ CONVENIENTE

+ MODERNO

+ ERGONÓMICO

+ FUNCIONAL



ISO 9001:2008

# Ziocompact

ENVASES PARA RESIDUOS DE RIESGO  
CONTENTORES CORTO-PERFURANTES  
PARA RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| CAPACIDADES<br>CAPACIDADES                                   | 3  |
| VENTAJAS TAPA NUEVA<br>VANTAGENS DA NOVA TAMPA               | 4  |
| INSTRUCCIONES GENERALES<br>INSTRUÇÕES GERAIS                 | 5  |
| USO CORRECTO DE LA TAPA<br>USO CORRETO DA TAMPA              | 6  |
| LÍMITE DE LLENADO<br>LIMITE DE ENCHIMENTO                    | 7  |
| PERSONALIZACIÓN DE LA ETIQUETA<br>PERSONALIZAÇÃO DA ETIQUETA | 8  |
| SOPORTE DE MESA<br>SUPORTE DE MESA                           | 9  |
| SOPORTE DE BARRA / PARED<br>SUPORTE DE BARRA / PAREDE        | 10 |
| BANDEJA<br>BANDEJA                                           | 11 |
| DATOS TÉCNICOS<br>DADOS TÉCNICOS                             | 12 |
| LOGÍSTICA<br>LOGÍSTICA                                       | 13 |
| LOGÍSTICA - ACCESORIOS<br>LOGÍSTICA - ACESSÓRIOS             | 14 |

# Ziocompact

ENVASES PARA RESIDUOS DE RIESGO  
CONTENTORES CORTO-PERFORANTES  
PARA RESIDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS



1,8 Litros



3 Litros



5 Litros



10 Litros

# Biocompact

ENVASES PARA RESIDUOS DE RIESGO  
CONTENTORES CORTO-PERFURANTES  
PARA RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS

VENTAJAS TAPA NUEVA

VANTAGENS DA NOVA TAMPA




- 1 Tabique asidero que hace que el contenedor Biocompact sea aún más fácil y seguro de manejar ya que permite el accionamiento giratorio de la tapa de forma rápida y segura impidiendo cualquier contacto con el residuo durante su utilización.

*Pega que faz com que o contentor Biocompact seja mais fácil e seguro de manobrar e que permite o girar da tampa de forma rápida e segura impedindo qualquer contato com o resíduo durante a sua utilização.*

- 2 Nueva forma del riñón del cierre definitivo con alojamiento para los dedos que permite llevar a cabo el cierre definitivo con mayor comodidad.

*Novo formato do fecho definitivo com espaço para colocação dos dedos de forma a permitir o encerramento definitivo com maior facilidade.*

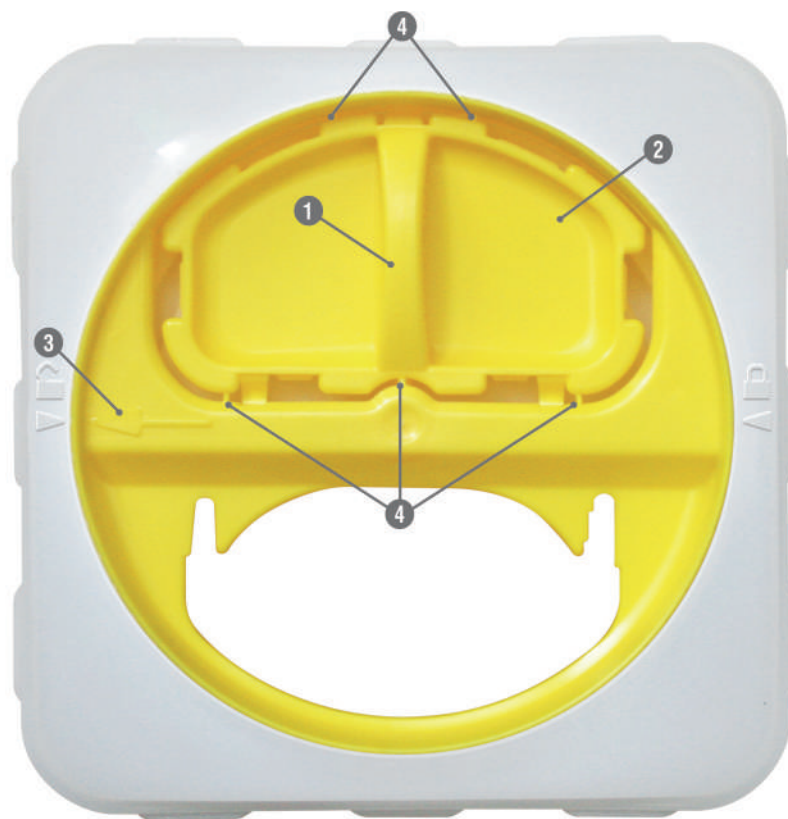

- 3 Flecha indicativa de la posición de la tapa para llevar a cabo el cierre definitivo, facilita la comprobación de que la tapa está en la posición apropiada para llevar a cabo el mismo (🔒 o 🔓)

*Seta indicativa da posição da tampa para levar a cabo o encerramento definitivo. Facilmente se comprova que a tampa está na posição correta (🔒 o 🔓)*

- 4 Anclajes en el marco del riñón que se rompen mediante la presión realizada al llevar a cabo el cierre definitivo, cuya ruptura asegura el mismo y permite comprobar que se ha realizado correctamente.

*Fixações no fecho definitivo que se quebram mediante a pressão realizada para efetuar o encerramento definitivo, cuja rutura assegura o correto encerramento e permite comprovar que este se realizou corretamente.*

# Ziocompact

ENVASES PARA RESIDUOS DE RIESGO  
CONTENTORES CORTO-PERFURANTES  
PARA RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS



MONTAJE  
MONTAGEM



Alinear la tapa sobre el contenedor. Presionar fuertemente sobre las esquinas del contenedor hasta oír los "clicks" de comprobación

*Alinhar a tampa sobre o contendor. Pressionar fortemente sobre as esquinas do contendor até ouvir os "clicks" comprovativos da montagem correta*

APERTURA  
ABERTURA



Girar la parte circular de la tapa en el sentido de las agujas del reloj hasta escuchar "clic"

*Girar a parte circular da tampa no sentido dos ponteiros do relógio até ouvir "click"*

PRECIERRE  
ENCERRAMENTO TEMPORÁRIO



El cierre provisional se obtiene girando la parte circular de la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj hasta escuchar "clic"

*Obtém-se o encerramento provisório girando a parte circular da tampa no sentido contrário aos ponteiros do relógio até ouvir "click"*

CIERRE DEFINITIVO  
ENCERRAMENTO DEFINITIVO



Comprobar que la tapa está girada totalmente en sentido contrario a las agujas del reloj hasta escuchar "clic" (posición PRECIERRE). A continuación presionar el riñón amarillo en los puntos indicados con ambos pulgares en el orden mostrado en las imágenes hasta escuchar los "clicks" que indican que la tapa ha quedado cerrada definitivamente

*Confirmar que a tampa está totalmente rodada, através de rotação no sentido contrário aos ponteiros do relógio até ouvir "click" (posição de ENCERRAMENTO TEMPORÁRIO). Para continuar pressione a parte amarela nos pontos indicados com os dois dedos polegares pela ordem mostrada nas imagens até ouvir os "clicks" que indicam que a tampa ficou encerrada definitivamente*

ELIMINACIÓN DE MATERIAL  
ELIMINAÇÃO DO MATERIAL



Sistema de extracción de agujas y utensilios

*Sistema de extração de agulhas e utensilios*

SOPORTE DE MESA  
SUPORTE DE MESA



SOPORTE DE BARRA / PARED  
SUPORTE DE BARRA / PAREDE



BANDEJA  
BANDEJA



# Ziocompact

ENVASES PARA RESIDUOS DE RIESGO  
CONTENTORES CORTO-PERFURANTES  
PARA RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS

USO CORRECTO DE LA TAPA  
USO CORRETO DA TAMPA



APERTURA  
ABERTURA



Girar la parte circular de la tapa en el sentido de las agujas del reloj hasta escuchar "clic"  
*Girar a parte circular da tampa no sentido dos ponteiros do relógio até ouvir "click"*

PRECIERRE  
ENCERRAMENTO TEMPORÁRIO



Girar la parte circular de la tapa en sentido contrario de las agujas del reloj hasta escuchar "clic"  
*Girar a parte circular da tampa no sentido contrário aos ponteiros do relógio até ouvir "click"*



! CIERRE DEFINITIVO  
ENCERRAMENTO DEFINITIVO



1 Comprobar que la tapa está girada totalmente en sentido contrario a las agujas del reloj hasta escuchar "clic" (posición PRECIERRE)

*Confirmar que a tampa está totalmente rodada, através de rotação no sentido contrário aos ponteiros do relógio até ouvir "click" (posição de ENCERRAMENTO TEMPORÁRIO)*



2 A continuación presionar el riñón amarillo en los puntos indicados con ambos pulgares en el orden mostrado en las imágenes hasta escuchar los "clicks" que indican que la tapa ha quedado cerrada definitivamente

*Para continuar pressione a parte amarela nos pontos indicados com os dois dedos polegares pela ordem mostrada nas imagens até ouvir os "clicks" que indicam que a tampa ficou encerrada definitivamente*

# Ziocompact

ENVASES PARA RESIDUOS DE RIESGO  
CONTENTORES CORTO-PERFURANTES  
PARA RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS

LÍMITE DE LLENADO  
LÍMITE DE ENCHIMENTO



⚠ NO FORZAR JAMÁS LA INTRODUCCIÓN DE RESIDUOS  
NÃO FORÇAR A INTRODUÇÃO DE RESÍDUOS  
⚠ NO SOBREPASAR EL 80% DE LA CAPACIDAD ÚTIL  
NÃO ULTRAPASSAR 80% DA CAPACIDADE ÚTIL



▲ LÍMITE DE LLENADO / LÍMITE DE ENCHIMENTO ▲

# Ziocompact

ENVASES PARA RESIDUOS DE RIESGO  
CONTENTORES CORTO-PERFORANTES  
PARA RESIDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS

PERSONALIZACIÓN DE LA ETIQUETA  
PERSONALIZAÇÃO DA ETIQUETA



Etiqueta personalizada con la información y logotipo de la empresa cliente  
*Etiqueta personalizada com a informação e logotipo da empresa do cliente*




# Ziocompact

ENVASES PARA RESIDUOS DE RIESGO  
CONTENTORES CORTO-PERFORANTES  
PARA RESIDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS

SOPORTE DE MESA  
SUPORTE DE MESA



COLOCACIÓN DE SOPORTE CON VENTOSAS  
COLOCAÇÃO DE SUPORTE COM VENTOSAS

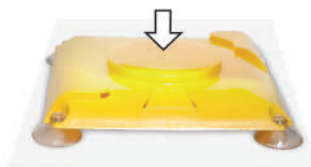

Colocar el soporte presionándolo sobre la superficie para fijarlo a ella

Colocar o suporte pressionando sobre a superfície para fixá-lo

COLOCACIÓN DE SOPORTE CON TORNILLOS  
COLOCAÇÃO DE SUPORTE COM PARAFUSOS



Retirar las ventosas  
Retirar as ventosas



Colocar los tornillos y ajustarlos hasta fijar el soporte a la superficie  
Colocar os parafusos e apertá-los até fixar o suporte à superfície



INSERCIÓN DE CONTENEDOR EN SOPORTE  
INSERÇÃO DO CONTENTOR NO SUPORTE



Colocar el contenedor sobre el soporte girando ligeramente hasta que encaje en él

Colocar o conteúdo sobre o suporte rodando ligeiramente até estar encaixado

EXTRACCIÓN DE CONTENEDOR DEL SOPORTE  
EXTRAÇÃO DO CONTENTOR DO SUPORTE




Presionar PUSH para liberar el contenedor y girar el contenedor para su extracción

Pressionar "PUSH" até libertar o contentor e girá-los para o retirar


# Biocompact

ENVASES PARA RESIDUOS DE RIESGO  
CONTENTORES CORTO-PERFURANTES  
PARA RESIDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS

SOPORTE DE BARRA / PARED  
SUPORTE DE BARRA / PAREDE

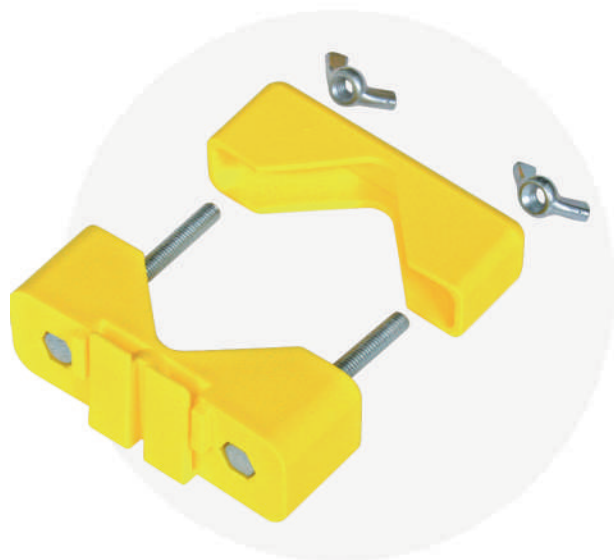


INSTALACIÓN: SOPORTE BARRA  
INSTALAÇÃO: SUPORTE DE BARRA

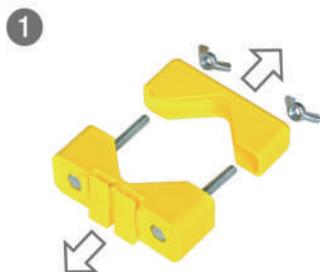

Desenroscar las palomillas para extraer los tornillos y separar las dos piezas del soporte  
*Desenroscar as porcas para extrair os parafusos das peças do suporte*

INSTALACIÓN: SOPORTE PARED  
INSTALAÇÃO: SUPORTE DE PAREDE

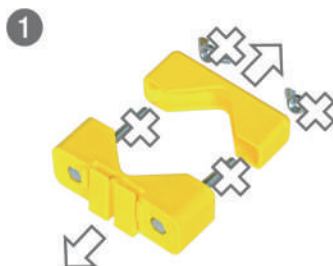


Desenroscar las palomillas para extraer los tornillos y separar las dos piezas del soporte  
*Desenroscar as porcas para extrair os parafusos das peças do suporte*




Colocar ambas piezas en la barra y fijarlo al mismo introduciendo de nuevo los tornillos y fijándolos con las palomillas  
*Colocar as duas peças do suporte no carro e fixá-lo introduzindo novamente os parafusos e fixá-los com as porcas*



Atornillarlos hasta que el soporte quede fijo a la pared  
*Aparafusá-los até que o suporte esteja fixo na parede*

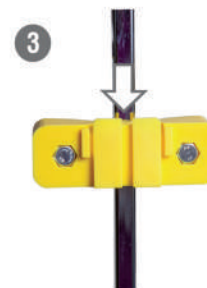

Insertar el contenedor en la ranura del soporte habilitada para la sujeción del mismo  
*Inserir o contentor na ranhura do suporte correspondente*

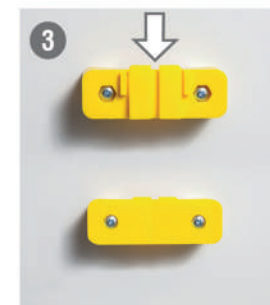

Insertar el contenedor en la ranura del soporte habilitada para la sujeción del mismo  
*Inserir o contentor na ranhura do suporte correspondente*



# Ziocompact

ENVASES PARA RESIDUOS DE RIESGO  
CONTENTORES CORTO-PERFURANTES  
PARA RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS

BANDEJA  
BANDEJA



INSERCIÓN DEL CONTENEDOR EN LA BANDEJA  
INSERÇÃO DO CONTENTOR NA BANDEJA



Colocar el contenedor sobre la bandeja  
girando ligeramente hasta que encaje en ella  
Colocar o contentor na bandeja girando-o  
ligeiramente até ficar encaixado

EXTRACCIÓN DEL CONTENEDOR DE LA BANDEJA  
EXTRAÇÃO DO CONTENTOR DA BANDEJA



Girar el contenedor para su extracción de la  
bandeja  
Girar o contentor para o extrair da bandeja

# Biocompact

ENVASES PARA RESIDUOS DE RIESGO  
CONTENEDORES CORTO-PERFORANTES  
PARA RESIDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS



## DATOS TÉCNICOS DADOS TÉCNICOS

| PRODUCTO<br>PRODUTO                        | REF.<br>REF. | MEDIDAS<br>MEDIDAS<br>(cm) | PESO UNITARIO<br>PESO UNITARIO<br>(kg) | CAPACIDAD NOM.<br>CAPACIDADE NOM.<br>(l) | CAPACIDAD ÚTIL<br>CAPACIDADE ÚTIL<br>(l) | CARGA MÁXIMA<br>CARGA MÁXIMA<br>(kg) |
|--------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| BioCompact 1,8L                            | BC18LATE     | 15,9 x 15,9 x 12,1         | 0,24                                   | 1,80                                     | 1,60                                     | 1,00                                 |
|                                            | BC18LAT      |                            |                                        |                                          |                                          |                                      |
| BioCompact 03L                             | BC03LATE     | 15,9 x 15,9 x 19,1         | 0,28                                   | 3,00                                     | 2,60                                     | 1,50                                 |
|                                            | BC03LAT      |                            |                                        |                                          |                                          |                                      |
| BioCompact 05L                             | BC05LATE     | 22 x 22 x 13               | 0,38                                   | 5,00                                     | 3,70                                     | 2,00                                 |
|                                            | BC05LAT      |                            |                                        |                                          |                                          |                                      |
| BioCompact 10L                             | BC10LATE     | 21,4 x 21,4 x 24,1         | 0,51                                   | 10,00                                    | 7,00                                     | 4,00                                 |
|                                            | BC10LAT      |                            |                                        |                                          |                                          |                                      |
| Bandeja                                    | SPBAN        | 37,5 x 35 x 26             | 0,30                                   |                                          |                                          |                                      |
| Soporte mesa<br>Suporte mesa               | SPMEBCA      | 1,5 x 18 x 18              | 0,09                                   |                                          |                                          |                                      |
| Soporte barra/pared<br>Suporte barra/pared | SPBABCA      | 18 x 11 x 3,7              | 0,07                                   |                                          |                                          |                                      |

# Biocompact

ENVASES PARA RESIDUOS DE RIESGO  
CONTENTORES CORTO-PERFORANTES  
PARA RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS



## LOGÍSTICA

| PRODUCTO<br>PRODUTO | REF.<br>REF. | UNID. CAJA<br>UNID. CAIXA | DIMENSIONES CAJA<br>DIMENSÕES DA CAIXA<br>(cm) | PESO CAJA<br>PESO DA CAIXA<br>(kg) | UNID. PALÉ<br>UNID. PALETE | TIPO PALÉ<br>TIPO PALETE | DIMENSIONES PALÉ<br>DIMENSÕES DA PALETE<br>(cm) | PESO PALÉ<br>PESO DA PALETE<br>(kg) |
|---------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| BioCompact 1,8L     | BC18LATE     | 30                        | 35,2 x 34,5 x 51,2                             | 7,05                               | 630                        | EURO                     | 80 x 120 x 207                                  | 163,05                              |
|                     | BC18LAT      |                           |                                                |                                    | 900                        | USA                      | 100 x 120 x 207                                 | 226,50                              |
|                     | BC18LAT      |                           |                                                |                                    | 1.080                      | USA MEGA                 | 100 x 120 x 224                                 | 268,80                              |
| BioCompact 03L      | BC03LATE     | 30                        | 35 x 35 x 55,5                                 | 8,25                               | 630                        | EURO                     | 80 x 120 x 217                                  | 188,25                              |
|                     | BC03LAT      |                           |                                                |                                    | 900                        | USA                      | 100 x 120 x 217                                 | 262,50                              |
|                     | BC03LAT      |                           |                                                |                                    | 1.080                      | USA MEGA                 | 100 x 120 x 237                                 | 312,00                              |
| BioCompact 05L      | BC05LATE     | 30                        | 25 x 46,5 x 96                                 | 11,40                              | 420                        | EURO                     | 80 x 120 x 212                                  | 175,00                              |
|                     | BC05LATE     |                           |                                                |                                    | 510                        | EURO MEGA                | 80 x 120 x 254                                  | 209,00                              |
|                     | BC05LAT      |                           |                                                |                                    | 600                        | USA                      | 100 x 120 x 212                                 | 243,00                              |
|                     | BC05LAT      |                           |                                                |                                    | 750                        | USA MEGA                 | 100 x 120 x 262                                 | 303,00                              |
| BioCompact 10L      | BC10LATE     | 30                        | 25 x 46,5 x 94,5                               | 11,80                              | 280                        | EURO                     | 80 x 120 x 205                                  | 180,20                              |
|                     | BC10LATE     |                           |                                                |                                    | 340                        | EURO MEGA                | 80 x 120 x 250                                  | 215,60                              |
|                     | BC10LAT      |                           |                                                |                                    | 400                        | USA                      | 100 x 120 x 210                                 | 251,00                              |
|                     | BC10LAT      |                           |                                                |                                    | 500                        | USA MEGA                 | 100 x 120 x 259                                 | 310,00                              |

# Ziocompact

ENVASES PARA RESIDUOS DE RIESGO  
CONTENTORES CORTO-PERFURANTES  
PARA RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS



## LOGÍSTICA - ACCESORIOS LOGÍSTICA - ACESSÓRIOS

| PRODUCTO<br>PRODUTO                         | REF.<br>REF. | UNID. CAJA<br>UNID. CAIXA | DIMENSIONES CAJA<br>DIMENSÕES DA CAIXA<br>(cm) | PESO CAJA<br>PESO DA CAIXA<br>(kg) | UNID. PALÉ<br>UNID. PALETE | TIPO PALÉ<br>TIPO PALETE | DIMENSIONES PALÉ<br>DIMENSÕES DA PALETE<br>(cm) | PESO PALÉ<br>PESO DA PALETE<br>(kg) |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Bandeja                                     | SPBAN        | 22                        | 53,5 x 43,5 x 35,5                             | 6,60                               | 480                        | EURO                     | 80 x 120 x 231                                  | 159,00                              |
|                                             |              |                           |                                                |                                    | 576                        | EURO MEGA                | 80 x 120 x 274                                  | 187,80                              |
|                                             |              |                           |                                                |                                    | 720                        | USA                      | 100 x 120 x 231                                 | 231,00                              |
|                                             |              |                           |                                                |                                    | 864                        | USA MEGA                 | 100 x 120 x 274                                 | 274,20                              |
| Soporte mesa<br>Suporte mesa                | SPMEBCA      | 30                        | 51 x 40,5 x 20,5                               | 2,55                               | 1.980                      | EURO                     | 80 x 120 x 226                                  | 183,30                              |
|                                             |              |                           |                                                |                                    | 2.310                      | EURO MEGA                | 80 x 120 x 261                                  | 211,35                              |
|                                             |              |                           |                                                |                                    | 2.340                      | USA                      | 100 x 120 x 226                                 | 213,90                              |
|                                             |              |                           |                                                |                                    | 2.730                      | USA MEGA                 | 100 x 120 x 261                                 | 247,05                              |
| Soporte barra/pared<br>Suporte barra/parede | SPBABCA      | 30                        | 19,5 x 19,5 x 22,2                             | 2,82                               | 5.280                      | EURO                     | 80 x 120 x 208                                  | 511,32                              |
|                                             |              |                           |                                                |                                    | 6.930                      | EURO MEGA                | 80 x 120 x 268                                  | 666,42                              |
|                                             |              |                           |                                                |                                    | 7.200                      | USA                      | 100 x 120 x 208                                 | 691,80                              |
|                                             |              |                           |                                                |                                    | 9.900                      | USA MEGA                 | 100 x 120 x 268                                 | 945,60                              |



**Sanypick S.A**

C/ Carlos Jiménez Díaz, 23. ES-28806 Alcalá de Henares (Madrid)  
+34 91 884 11 86 · [info@sanypick.com](mailto:info@sanypick.com)  
[www.sanypick.com](http://www.sanypick.com)