

BioCrip

FÛTS POUR DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS
À RISQUES INFECTIEUX

CONTAINERS FOR BIOHAZARD MATERIAL



+ UTILE
USEFUL

+ RENFORCÉ
REINFORCED

+ PRATIQUE
PRACTICAL

+ CONSISTANT
CONSISTENT



ISO 9001:2008

BioCrip

FÛTS POUR DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX
CONTAINERS FOR BIOHAZARD MATERIAL

DIMENSIONS <i>SIZES</i>	3
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES <i>GENERAL INSTRUCTIONS</i>	4
COUVERCLE STANDARD <i>SIMPLE LID</i>	5
COUVERCLE À OPERCULE <i>PORTRHOLE LID</i>	6
LIMITE DE REMPLISSAGE <i>FILLING LIMITS</i>	7
PERSONNALISATION DE L'ÉTIQUETTE <i>CUSTOMIZATION OF LABEL</i>	8
CHARIOT <i>TROLLEY</i>	9
DONNÉES TECHNIQUES <i>TECHNICAL DATA</i>	10
LOGISTIQUE <i>LOGISTICS</i>	11
LOGISTIQUE - COUVERCLES, CHARIOT <i>LOGISTICS - LIDS & TROLLEY</i>	12

BioCrip

FÛTS POUR DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX
CONTAINERS FOR BIOHAZARD MATERIAL



30 Litres
30 Litre

50 Litres
50 Litre

60 Litres
60 Litre

BioCrip

FÛTS POUR DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX
CONTAINERS FOR BIOHAZARD MATERIAL



30L



50L




60L

ASSEMBLAGE COUVERCLE STANDARD
ASSEMBLY SIMPLE LID




Insérer les charnières au fût
Insert the hinges of the lid into the slots of the container as shown

FERMETURE PROVISOIRE COUVERCLE STANDARD
PRE-CLOSURE SIMPLE LID

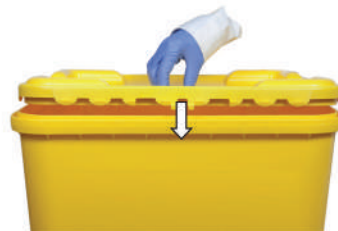

Baisser le couvercle sans forcer
Lower the lid without forcing

FERMETURE DÉFINITIVE COUVERCLE STANDARD
FINAL CLOSURE SIMPLE LID

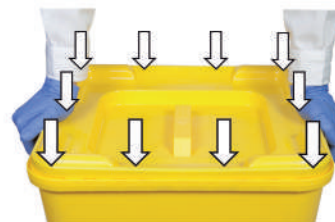

Appuyer consécutivement sur les côtés du couvercle pour le fermer définitivement

Push down consecutively all the sides of the lid to permanently close it

TRANSPORT
TRANSPORT



Poignées latérales et supérieure pour son transport
Side and top handles for transport

ACCESSOIRES - CHARIOT
ACCESSORIES - TROLLEY



Introduire sur le chariot le conteneur vide et son couvercle assemblé. Placer le crochet dans la poignée du couvercle

Insert the empty container with lid into the trolley. Attach the hook to the lid's handle

ASSEMBLAGE COUVERCLE À OPERCULE
ASSEMBLY PORTHOLE LID



Insérer les charnières au fût
Insert the hinges of the lid into the slots of the container as shown

Appuyer consécutivement sur les côtés du couvercle pour le fermer définitivement

Push down consecutively all the sides of the lid to permanently close it

FERMETURE PROVISOIRE COUVERCLE À OPERCULE
PRE-CLOSURE PORTHOLE LID



Introduire l'opercule et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre

Insert the circular lid and turn it clockwise

OUVERTURE COUVERCLE À OPERCULE
OPENING PORTHOLE LID



Tourner l'opercule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

Turn the lid anticlockwise

FERMETURE DÉFINITIVE COUVERCLE À OPERCULE
FINAL CLOSURE PORTHOLE LID



Tourner l'opercule dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre 3 clics

Turn the lid clockwise until you hear 3 clicks



Appuyer sur la pédale du chariot avec le pied pour ouvrir le fût

Press the trolley pedal with the foot to open the container

BioCrip

FÛTS POUR DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX
CONTAINERS FOR BIOHAZARD MATERIAL

COUVERCLE STANDARD
SIMPLE LID



30L



50L



60L

ASSEMBLAGE
ASSEMBLY




Insérer les charnières sur le fût
*Insert the hinges of the lid
into the slots of the container*

FERMETURE PROVISOIRE
PROVISIONAL CLOSURE



Baisser le couvercle sans forcer
Lower the lid without forcing

FERMETURE DÉFINITIVE
FINAL CLOSURE

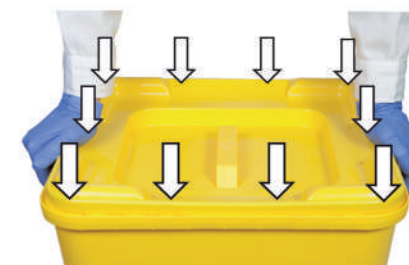

Appuyer consécutivement sur les côtés du
couvercle pour le fermer définitivement
*Push down consecutively all the sides of
the lid to permanently close it*



BioCrip

FÛTS POUR DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX
CONTAINERS FOR BIOHAZARD MATERIAL

COUVERCLE À OPERCULE
PORTHOLE LID



30L



50L




60L



ASSEMBLAGE ASSEMBLY



Insérer les charnières sur le fût
Insert the hinges of the lid into the slots of the container

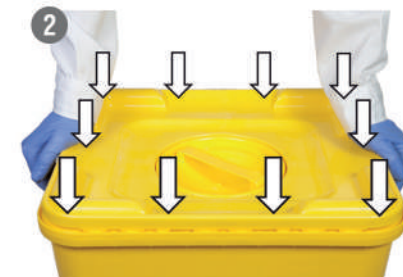

Appuyer consécutivement sur les côtés du couvercle pour le fermer définitivement
Push down consecutively all the sides of the lid to permanently close it

FERMETURE PROVISOIRE PROVISIONAL CLOSURE



Introduire l'opercule et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre
Insert the circular lid and turn it clockwise

OUVERTURE OPENING



Tourner l'opercule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Turn the circular lid anticlockwise

FERMETURE DÉFINITIVE FINAL CLOSURE



Tourner l'opercule dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre 3 clicks
Turn the circular lid clockwise until you hear 3 clicks

BioCrip

FÛTS POUR DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX
CONTAINERS FOR BIOHAZARD MATERIAL

LIMITE DE REMPLISSAGE
FILLING LIMITS



30L



50L



60L



! NE JAMAIS FORCER POUR L'INTRODUCTION DES DÉCHETS
NEVER FORCE THE INTRODUCTION OF WASTE

! NE JAMAIS DÉPASSER LA LIMITE DE REMPLISSAGE
DO NOT EXCEED THE USABLE CAPACITY



▲ LIMITE DE REMPLISSAGE / DO NOT FILL ABOVE THE LINE ▲

BioCrip

FÛTS POUR DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX
CONTAINERS FOR BIOHAZARD MATERIAL

PERSONNALISATION DE L'ÉTIQUETTE
CUSTOMIZATION OF LABEL



30L




50L



60L



Etiquette personnalisée avec l'information et logo du client
Customized label with customer's logo and information

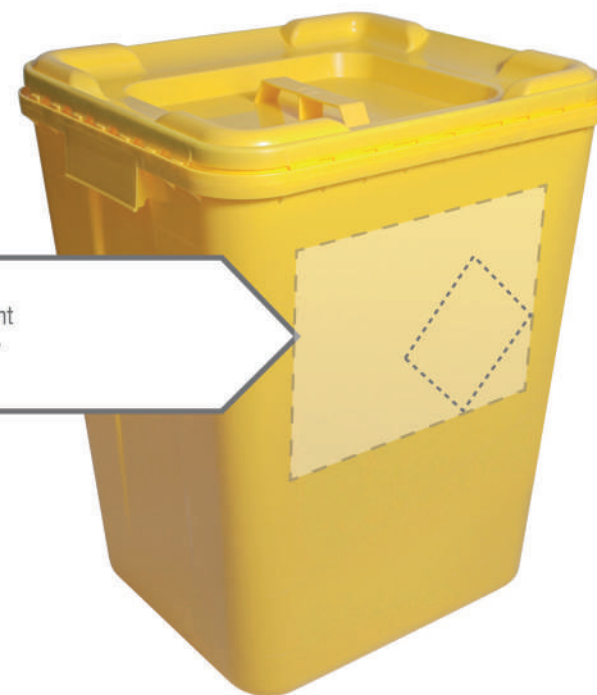

BioCrip

FÛTS POUR DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX
CONTAINERS FOR BIOHAZARD MATERIAL

CHARIOT
TROLLEY



30L



50L



60L

INSERTION DU FÛT SUR LE CHARIOT
INSERTION OF THE CONTAINER INTO THE TROLLEY



1



Insérer les charnières du couvercle au fût
Insert the hinges of the lid into the slots of the container

2



Introduire le fût vide avec le couvercle assemblé sur le chariot. Positionner le crochet dans la poignée du couvercle

Insert the empty container with lid into the trolley. Attach the hook to the lid handle

3



Appuyer sur la pédale du chariot avec le pied pour procéder à l'ouverture du fût

Press the trolley pedal with the foot to open the container

BioGrip

FÛTS POUR DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX
CONTAINERS FOR BIOHAZARD MATERIAL



DONNÉES TECHNIQUES TECHNICAL DATA

PRODUIT PRODUCT	REF. REF.	DIMENSIONS DIMENSIONS (cm)	POIDS UNITAIRE UNIT WEIGHT (kg)	CAPACITÉ NOM. NOMINAL CAPACITY (l)	CAPACITÉ UTILE USABLE CAPACITY (l)	CHARGE MAXIMALE MAXIMUM LOAD (kg)
BioGrip 30L	BG30LAE	35,5 x 39,8 x 31	0,85	30	28,90	15
BioGrip 30L	BG30LAC	35,5 x 39,8 x 31	0,85	30	28,90	15
BioGrip 50L	BG50LAE	35,5 x 39,8 x 48	1,40	50	46,80	20
BioGrip 50L	BG50LAC	35,5 x 39,8 x 48	1,40	50	46,80	20
BioGrip 60L	BG60LAE	35,5 x 39,8 x 56,6	1,70	60	52,70	30
BioGrip 60L	BG60LAC	35,5 x 39,8 x 56,6	1,70	60	52,70	30

PRODUIT PRODUCT	REF. REF.	DIMENSIONS DIMENSIONS (cm)	POIDS UNITAIRE UNIT WEIGHT (kg)
Couvercle Std. / Simple Lid	BGTPSAMA	22,8 x 3,8 x 3,4	0,34
Couvercle à Opercule / Porthole Lid	BGTPDAMA	23,3 x 3,9 x 3,4	0,46
Chariot / Trolley	CAR. BG.	86 x 38,5 x 46,5	7,76

BioGrip

FÛTS POUR DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX
CONTAINERS FOR BIOHAZARD MATERIAL



30L



50L



60L

LOGISTIQUE LOGISTICS

PRODUIT PRODUCT	REF. REF.	QTÉ PALETTE UNITS/PALLET	TYPE DE PALETTE PALLET TYPE	DIMENSIONS PALETTE PALLET DIMENSIONS (cm)	POIDS PALETTE PALLET WEIGHT (kg)
BioGrip 30L	BG30LAE	275	EURO	80 x 120 x 210	372,50
BioGrip 30L	BG30LAC	425	USA	100 x 120 x 210	567,50
BioGrip 50L	BG50LAE	175	EURO	80 x 120 x 230	277,50
BioGrip 50L	BG50LAC	275	USA	100 x 120 x 216	427,50
BioGrip 60L	BG60LAE	175	EURO	80 x 120 x 213	330,00
BioGrip 60L	BG60LAC	275	USA	102 x 120 x 220	510,00

BioCrip

FÛTS POUR DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX
CONTAINERS FOR BIOHAZARD MATERIAL



30L



50L



60L

LOGISTIQUE - COUVERCLES ET CHARIOT LOGISTICS - LIDS & TROLLEY

PRODUIT PRODUCT	REF. REF.	QTÉ/CARTON UNITS/CARTON	DIMENSIONS CARTON CARTON DIMENSIONS (cm)	POIDS CARTON CARTON WEIGHT (kg)	QTÉ/PALETTE UNITS/PALLET	TYPE DE PALETTE PALLET TYPE	DIMENSIONS PALETTE PALLET DIMENSIONS (cm)	POIDS PALETTE PALLET WEIGHT (kg)
Couvercle standard Simple lid	BGTPSAMA	25	39,8 x 37 x 65	8,40	525	EURO	80 x 120 x 248	191,40
					600	EURO MEGA	80 x 120 x 272	216,60
Couvercle à opercule Porthole lid	BGTPDAMA	20	40 x 40 x 77	9,24	360	EURO	80 x 120 x 251	181,32
					360	EURO MEGA	80 x 120 x 251	181,32
Chariot / Trolley	CAR. BG.	1	86,8 x 45,4 x 48,5	7,76	8	EURO	92 x 120 x 217	77,11



Sanypick S.A

C/ Carlos Jiménez Díaz, 23. ES-28806 Alcalá de Henares (Madrid)
+34 91 884 11 86 · info@sanypick.com
www.sanypick.com