

biotrex

CONTENEDOR PARA MATERIAL
BIOCONTAMINANTE

CONTENEDOR PARA RESÍDUOS HOSPITALARES
PERIGOSOS



+ PRÁCTICO
PRÁTICO

+ INFALIBLE
INFALÍVEL

+ OPTIMIZADOR DE ESPACIO
OTIMIZADOR DE ESPAÇO

+ INNOVADOR
INOVADOR



ISO 9001:2008

biotrex

CONTENEDOR PARA MATERIAL BIOCONTAMINANTE
CONTENTOR PARA RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS

CAPACIDADES <i>CAPACIDADES</i>	3
INSTRUCCIONES GENERALES <i>INSTRUÇÕES GERAIS</i>	4
TAPA SIMPLE <i>TAMPA SIMPLES</i>	5
TAPA DOBLE <i>TAMPA DUPLA</i>	6
LÍMITE DE LLENADO <i>LIMITE DE ENCHIMENTO</i>	7
PERSONALIZACIÓN DE LA ETIQUETA <i>PERSONALIZAÇÃO DA ETIQUETA</i>	8
CARRO <i>SUPORTE</i>	9
DATOS TÉCNICOS <i>DADOS TÉCNICOS</i>	10
LOGÍSTICA <i>LOGÍSTICA</i>	11
LOGÍSTICA - TAPAS Y CARRO <i>LOGÍSTICA - TAMPAS E SUPORTE</i>	12

biotrex

CONTENEDOR PARA MATERIAL BIOCONTAMINANTE
CONTENEDOR PARA RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS



30 Litros

50 Litros

60 Litros

biotrex

CONTENEDOR PARA MATERIAL BIOCONTAMINANTE
 CONTENOR PARA RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS



30L

50L

60L

MONTAJE TAPA SIMPLE
 MONTAGEM TAMPA SIMPLES




Insertar bisagras en el cuerpo
Inserir as dobradiças da tampa nas ranhuras do corpo do contentor

CIERRE PROVISIONAL TAPA SIMPLE
 FECHO PROVISÓRIO DA TAMPA SIMPLES



Bajar la tapa sin forzar
Baixar a tampa sem forçar

CIERRE DEFINITIVO TAPA SIMPLE
 FECHO DEFINITIVO DA TAMPA SIMPLES

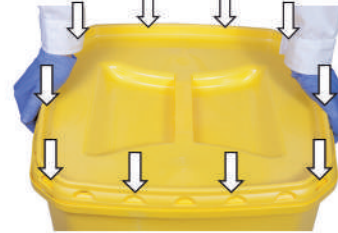

Presionar consecutivamente los laterales de la tapa para cerrarla definitivamente
Pressionar consecutivamente as laterais da tampa para encerrar definitivamente

TRANSPORTE
 TRANSPORTE



Asas laterales y superior para su transporte
Asas laterais para o transporte

ACCESORIOS - CARRO
 ACESSÓRIOS - SUORTE




Introducir el contenido vacío con la tapa montada en el carro. Colocar el gancho en el asa de la tapa
Introduzir no suporte o contentor vazio com a tampa montada. Colocar o gancho na pega da tampa

MONTAJE TAPA DOBLE
 MONTAGEM DE TAMPA DUPLA



Insertar bisagras en el cuerpo
Inserir as dobradiças da tampa nas ranhuras do corpo do contentor

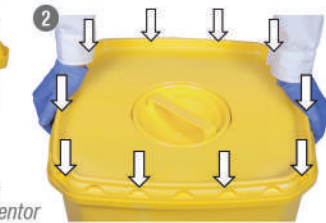

Presionar consecutivamente los laterales de la tapa para cerrarla definitivamente
Pressionar consecutivamente as laterais da tampa para encerrar definitivamente

CIERRE PROVISIONAL TAPA DOBLE
 FECHO PROVISÓRIO DA TAMPA DUPLA



Introducir la tapa opérculo y girarla en el sentido de las agujas del reloj
Introduzir a tampa intermédia e rodá-la no sentido do ponteiro do relógio

APERTURA TAPA DOBLE
 ABERTURA DE TAMPA DUPLA



Girar la tapa en el sentido contrario a las agujas del reloj
Rodar a tampa no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio

CIERRE DEFINITIVO TAPA DOBLE
 FECHO DEFINITIVO DE TAMPA DUPLA



Girar la tapa en el sentido de las agujas del reloj hasta escuchar 3 "clicks"
Rodar a tampa no sentido dos ponteiros do relógio até se ouvir 3 "clicks"



Presionar el pedal del carro con el pie para proceder a la apertura del contenido
Pressionar o pedal do suporte com o pé para proceder à abertura do contentor

biotrex

CONTENEDOR PARA MATERIAL BIOCONTAMINANTE
CONTENEDOR PARA RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS

TAPA SIMPLE
TAMPA SIMPLES



MONTAJE
MONTAGEM




Insertar bisagras en el cuerpo
Inserir as dobradiças da tampa nas ranhuras do corpo do contentor

CIERRE PROVISIONAL
FECHO PROVISÓRIO



Bajar la tapa sin forzar
Baixar a tampa sem forçar

CIERRE DEFINITIVO
FECHO DEFINITIVO

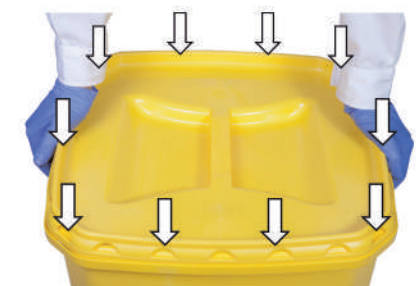

Presionar consecutivamente los laterales de la tapa para cerrarla definitivamente
Pressionar consecutivamente as laterais da tampa para encerrar definitivamente

biotrex

CONTENEDOR PARA MATERIAL BIOCONTAMINANTE
CONTENEDOR PARA RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS

TAPA DOBLE
TAMPA DUPLA



30L




50L




60L

MONTAJE
MONTAGEM

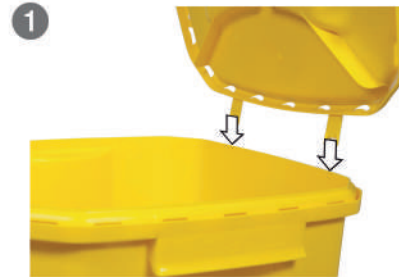

1

Insertar bisagras en el cuerpo
Inserir as dobradiças da tampa nas ranhuras do corpo do contentor

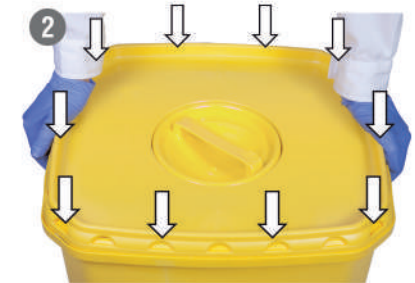

2

Presionar consecutivamente los laterales de la tapa para cerrarla definitivamente
Pressionar consecutivamente as laterais da tampa para encerrar definitivamente

CIERRE PROVISIONAL
FECHO PROVISÓRIO



Introducir la tapa opérculo y girarla en el sentido de las agujas del reloj
Introduzir a tampa intermédia e rodá-la no sentido do ponteiro do relógio

APERTURA
ABERTURA



Girar la tapa en el sentido contrario a las agujas del reloj
Rodar a tampa no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio

CIERRE DEFINITIVO
FECHO DEFINITIVO



Girar la tapa en el sentido de las agujas del reloj hasta escuchar "3 clics"
Rodar a tampa no sentido dos ponteiros do relógio até se ouvir 3 "clicks"



biotrex

CONTENEDOR PARA MATERIAL BIOCONTAMINANTE
CONTENEDOR PARA RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS

LÍMITE DE LLENADO
LIMITE DE ENCHIMENTO



NO FORZAR JAMÁS LA INTRODUCCIÓN DE RESIDUOS
NÃO FORÇAR A INTRODUÇÃO DE RESÍDUOS



NO SOBREPASAR EL 80% DE LA CAPACIDAD ÚTIL
NÃO ULTRAPASSAR 80% DA CAPACIDADE ÚTIL



▲ LIMITE DE LLENADO / LIMITE DE ENCHIMENTO ▲

biotrex

CONTENEDOR PARA MATERIAL BIOCONTAMINANTE
CONTENTOR PARA RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS

PERSONALIZACIÓN DE LA ETIQUETA
PERSONALIZAÇÃO DA ETIQUETA



Etiqueta personalizada con la información y logotipo de la empresa cliente
Etiqueta personalizada com a informação e logotipo da empresa do cliente



biotrex

CONTENEDOR PARA MATERIAL BIOCONTAMINANTE
CONTENEDOR PARA RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS

CARRO
SOPORTE



30L



50L



60L

INSERCIÓN DE CONTENEDOR EN CARRO
INTRODUÇÃO DO CONTENEDOR NO SUPORTE



1



Insertar las bisagras de la tapa en las ranuras del cuerpo
Inserir as dobradiças da tampa nas ranhuras do corpo do contentor

2



Introducir el contenido vacío con la tapa montada en el carro. Colocar el gancho en el asa de la tapa
Introduzir no suporte o contentor vazio com a tampa montada. Colocar o gancho na pega da tampa

3



Presionar el pedal del carro con el pie para proceder a la apertura del contenido
Pressionar o pedal do suporte com o pé para proceder à abertura do contentor

biotrex

CONTENEDOR PARA MATERIAL BIOCONTAMINANTE
 CONTENEDOR PARA RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS



DATOS TÉCNICOS DADOS TÉCNICOS

PRODUCTO PRODUTO	REF. REF.	MEDIDAS MEDIDAS (cm)	PESO UNITARIO PESO UNITÁRIO (kg)	CAPACIDAD NOM. CAPACIDADE NOM. (l)	CAPACIDAD ÚTIL CAPACIDADE ÚTIL (l)	CARGA MÁXIMA CARGA MÁXIMA (kg)
BioTrex 30L	BTX30LA	40 x 40 x 28,1	0,83	30	25	15
BioTrex 50L	BTX50LA	40 x 40 x 45,4	1,21	50	43	25
BioTrex 60L	BTX60LA	40 x 40 x 55,1	1,38	60	52	30
Tapa Simple Tampa Simples	BTXTPA	39,2 x 39 x 4,9	0,37			
Tapa Doble Tampa Dupla	BTXTPDA	40x 40 x 77	0,46			
Carro Suporte	CAR. BG.	86 x 38,5 x 46,5	7,76			

biotrex

CONTENEDOR PARA MATERIAL BIOCONTAMINANTE
CONTENEDOR PARA RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS



LOGÍSTICA

PRODUCTO PRODUTO	REF. REF.	UNID. PALÉ UNID. PALETE	TIPO PALÉ TIPO PALETE	DIMENSIONES PALÉ DIMENSÕES DA PALETE (cm)	PESO PALÉ PESO DA PALETE (kg)
BioTrex 30L	BTX30LA	325	EURO	120 x 80 x 215	279,75
BioTrex 50L	BTX50LA	225	EURO	120 x 80 x 225	282,25
BioTrex 60L	BTX60LA	200	EURO	120 x 80 x 230	285,20

biotrex

CONTENEDOR PARA MATERIAL BIOCONTAMINANTE
 CONTENTOR PARA RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS



LOGÍSTICA - TAPAS Y CARRO LOGÍSTICA - TAMPAS E SUPORTE

PRODUCTO PRODUTO	REF. REF.	UNID. CAJA UNID. CAIXA	DIMENSIONES CAJA DIMENSÕES DA CAIXA (cm)	PESO CAJA PESO DA CAIXA (kg)	UNID. PALÉ UNID. PALETE	TIPO PALÉ TIPO PALETE	DIMENSIONES PALÉ DIMENSÕES DA PALETE (cm)	PESO PALÉ PESO DA PALETE (kg)
Tapa Simple Tampa Simples	BTXTPA	25	65 x 42 x 41,5	9,20	525	EURO	124 x 85 x 251	203,20
Tapa Doble Tampa Dupla	BTXTPDA	20	40 x 40 x 77	9,24	360	EURO	80 x 120 x 251	181,32
Soporte	CAR. BG.	1	86 x 45,5 x 48,5	7,76	8	EURO	92 x 120 x 217	77,11



Sanypick S.A

C/ Carlos Jiménez Díaz, 23. ES-28806 Alcalá de Henares (Madrid)
+34 91 884 11 86 · info@sanypick.com
www.sanypick.com