

biotrex

FÛTS POUR DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE
SOINS À RISQUES INFECTIEUX

CONTAINERS FOR BIOHAZARD MATERIAL



+ PRATIQUE
PRACTICAL

+ INFALLIBLE
INFALLIBLE

+ OPTIMISATION DE L'ESPACE
SPACE OPTIMIZATION

+ INNOVATEUR
INNOVATIVE



ISO 9001:2008

biotrex

FÛTS POUR DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX
CONTAINERS FOR BIOHAZARD MATERIAL

DIMENSIONS <i>SIZES</i>	3
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES <i>GENERAL INSTRUCTIONS</i>	4
COUVERCLE STANDARD <i>SIMPLE LID</i>	5
COUVERCLE À OPERCULE <i>PORTRHOLE LID</i>	6
LIMITE DE REMPLISSAGE <i>FILLING LIMITS</i>	7
PERSONNALISATION DE L'ÉTIQUETTE <i>CUSTOMIZATION OF LABEL</i>	8
CHARIOT <i>TROLLEY</i>	9
DONNÉES TECHNIQUES <i>TECHNICAL DATA</i>	10
LOGISTIQUE <i>LOGISTICS</i>	11
LOGISTIQUE - COUVERCLES ET CHARIOT <i>LOGISTICS - LIDS & TROLLEY</i>	12

biotrex

FÛTS POUR DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX
CONTAINERS FOR BIOHAZARD MATERIAL



biotrex

FÛTS POUR DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX
CONTAINERS FOR BIOHAZARD MATERIAL




30L

50L

60L

ASSEMBLAGE COUVERCLE STANDARD ASSEMBLY SIMPLE LID

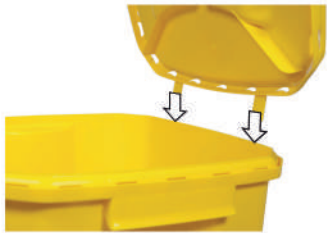


Insérer les charnières au fût
Insert the hinges of the lid into the slots of the container as shown

FERMETURE PROVISOIRE COUVERCLE STANDARD PRE-CLOSURE SIMPLE LID



Baisser le couvercle sans forcer
Lower the lid without forcing

FERMETURE DÉFINITIVE COUVERCLE STANDARD FINAL CLOSURE SIMPLE LID

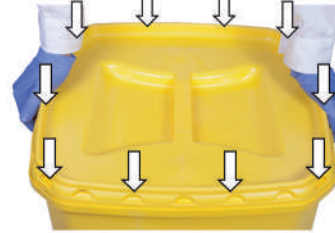

Appuyer consécutivement sur les côtés du couvercle pour le fermer définitivement
Push down consecutively all the sides of the lid to permanently close it

TRANSPORT TRANSPORT




Poignées latérales et supérieure pour son transport
Side and top handles for transport

ACCESSOIRES - CHARIOT ACCESSORIES - TROLLEY



Introduire sur le chariot le conteneur vide et son couvercle assemblé. Placer le crochet dans la poignée du couvercle
Insert the empty container with lid into the trolley. Attach the hook to the lid's handle

ASSEMBLAGE COUVERCLE À OPERCULE ASSEMBLY PORTHOLE LID

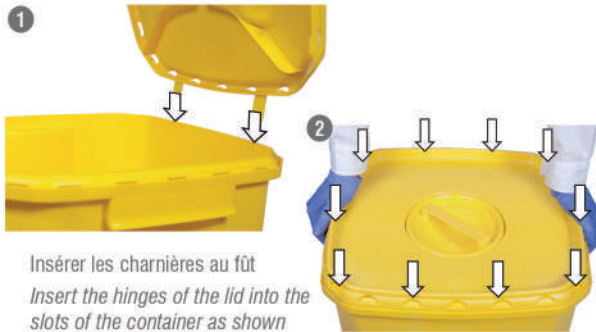

Insérer les charnières au fût
Insert the hinges of the lid into the slots of the container as shown

Appuyer consécutivement sur les côtés du couvercle pour le fermer définitivement
Push down consecutively all the sides of the lid to permanently close it

FERMETURE PROVISOIRE COUVERCLE À OPERCULE PRE-CLOSURE PORTHOLE LID



Introduire l'opercule et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre
Insert the circular lid and turn it clockwise

OUVERTURE COUVERCLE À OPERCULE OPENING PORTHOLE LID



Tourner l'opercule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Turn the lid anticlockwise

FERMETURE DÉFINITIVE COUVERCLE À OPERCULE FINAL CLOSURE PORTHOLE LID



Tourner l'opercule dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre 3 clicks
Turn the lid clockwise until you hear 3 clicks



Appuyer sur la pédale du chariot avec le pied pour ouvrir le conteneur
Press the trolley pedal with the foot to open the container

biotrex

FÛTS POUR DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX
CONTAINERS FOR BIOHAZARD MATERIAL

COUVERCLE STANDARD
SIMPLE LID



ASSEMBLAGE
ASSEMBLY




Insérer les charnières sur le fût
*Insert the hinges of the lid
into the slots of the container*

FERMETURE PROVISOIRE
PROVISIONAL CLOSURE



Baisser le couvercle sans forcer
Lower the lid without forcing

FERMETURE DÉFINITIVE
FINAL CLOSURE

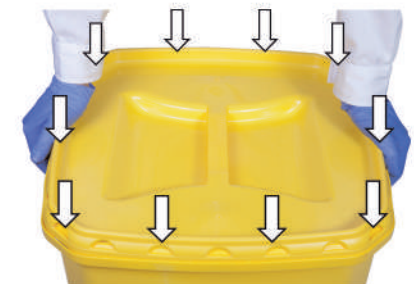

Appuyer consécutivement sur les côtés du couvercle pour le fermer définitivement
Push down consecutively all the sides of the lid to permanently close it


biotrex

FÛTS POUR DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX
CONTAINERS FOR BIOHAZARD MATERIAL


COUVERCLE À OPERCULE
PORTHOLE LID



ASSEMBLAGE
ASSEMBLY

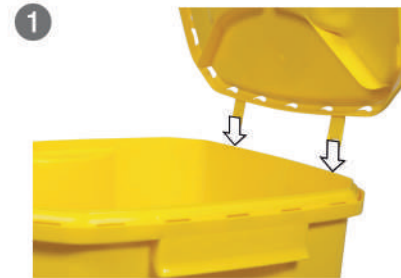

Insérer les charnières sur le fût
Insert the hinges of the lid into the slots of the container

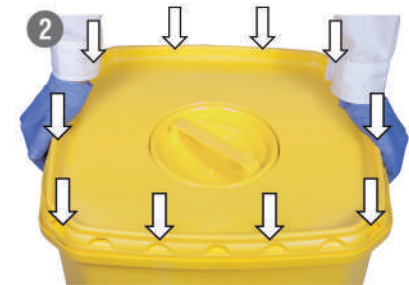

Appuyer consécutivement sur les côtés du couvercle pour le fermer définitivement
Push down consecutively all the sides of the lid to permanently close it

FERMETURE PROVISOIRE
PROVISIONAL CLOSURE



Introduire l'opercule et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre
Insert the circular lid and turn it clockwise

OUVERTURE
OPENING



Tourner l'opercule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Turn the circular lid anticlockwise

FERMETURE DÉFINITIVE
FINAL CLOSURE



Tourner l'opercule dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre 3 clics
Turn the circular lid clockwise until you hear 3 clicks

biotrex

FÛTS POUR DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX
CONTAINERS FOR BIOHAZARD MATERIAL

LIMITE DE REMPLISSAGE
FILLING LIMITS



30L



50L



60L



⚠ NE JAMAIS FORCER POUR L'INTRODUCTION DES DÉCHETS
NEVER FORCE THE INTRODUCTION OF WASTE

⚠ NE JAMAIS DÉPASSER LA LIMITE DE REMPLISSAGE
DO NOT EXCEED THE USABLE CAPACITY



▲ LIMITE DE REMPLISSAGE / DO NOT FILL ABOVE THE LINE ▲


biotrex

FÛTS POUR DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX
CONTAINERS FOR BIOHAZARD MATERIAL

PERSONNALISATION DE L'ÉTIQUETTE
CUSTOMIZATION OF LABEL



Étiquette personnalisée avec l'information et logo du client
Customized label with customer's logo and information

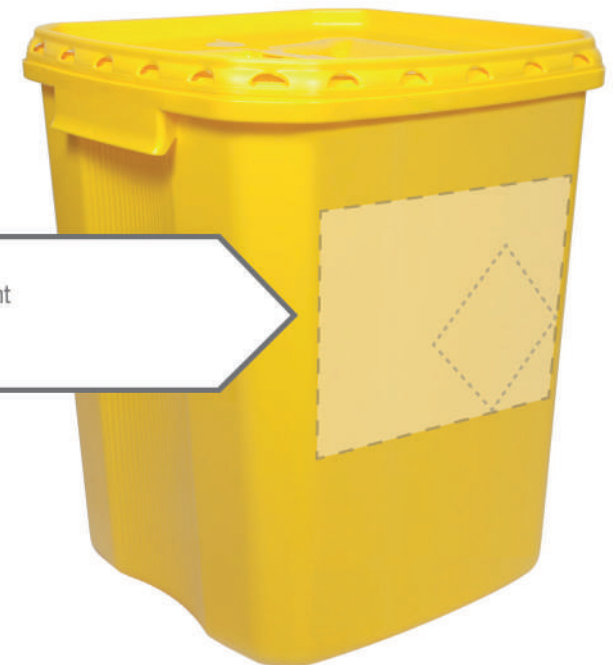

biotrex

FÛTS POUR DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX
CONTAINERS FOR BIOHAZARD MATERIAL

CHARIOT
TROLLEY



30L



50L



60L

INSERTION DU FÛT SUR LE CHARIOT
INSERTION OF THE CONTAINER INTO THE TROLLEY



1



Insérer les charnières du couvercle au fût
Insert the hinges of the lid into the slots of the container

2



Introduire le fût vide avec le couvercle assemblé sur le chariot. Positionner le crochet dans la poignée du couvercle
Insert the empty container with lid into the trolley. Attach the hook to the lid handle

3



Appuyer sur la pédale du chariot avec le pied pour procéder à l'ouverture du fût
Press the trolley pedal with the foot to open the container

biotrex

FÛTS POUR DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX
CONTAINERS FOR BIOHAZARD MATERIAL



DONNÉES TECHNIQUES TECHNICAL DATA

PRODUIT PRODUCT	REF. REF.	DIMENSIONS DIMENSIONS (cm)	POIDS UNITAIRE UNIT WEIGHT (kg)	CAPACITÉ NOM. NOMINAL CAPACITY (l)	CAPACITÉ UTILE USABLE CAPACITY (l)	CHARGE MAXIMALE MAXIMUM LOAD (kg)
BioTrex 30L	BTX30LA	40 x 40 x 28,1	0,83	30	25	15
BioTrex 50L	BTX50LA	40 x 40 x 45,4	1,21	50	43	25
BioTrex 60L	BTX60LA	40 x 40 x 55,1	1,38	60	52	30
Couvercle standard Simple lid	BTXTPA	39,2 x 39 x 4,9	0,37			
Couvercle à opercule Double lid	BTXTPDA	40 x 40 x 77	0,46			
Chariot Trolley	CAR. BG.	86 x 38,5 x 46,5	7,76			

biotrex

FÛTS POUR DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX
CONTAINERS FOR BIOHAZARD MATERIAL



LOGISTIQUE LOGISTICS

PRODUIT PRODUCT	REF. REF.	QTÉ. PALETTE UNITS/PALLET	TYPE DE PALETTE PALLET TYPE	DIMENSIONS PALETTE PALLET DIMENSIONS (cm)	POIDS PALETTE PALLET WEIGHT (kg)
BioTrex 30L	BTX30LA	325	EURO	120 x 80 x 215	279,75
BioTrex 50L	BTX50LA	225	EURO	120 x 80 x 225	282,25
BioTrex 60L	BTX60LA	200	EURO	120 x 80 x 230	285,20

biotrex

FÛTS POUR DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX
CONTAINERS FOR BIOHAZARD MATERIAL



LOGISTIQUE - COUVERCLES ET CHARIOT LOGISTICS - LIDS & TROLLEY

PRODUIT PRODUCT	REF. REF.	QTÉ/CARTON UNITS/CARTON	DIMENSIONS CARTON CARTON DIMENSIONS (cm)	POIDS CARTON CARTON WEIGHT (kg)	QTÉ/PALETTE UNITS/PALLET	TYPE DE PALETTE PALLET TYPE	DIMENSIONS PALETTE PALLET DIMENSIONS (cm)	POIDS PALETTE PALLET WEIGHT (kg)
Couvercle standard Simple lid	BTXTPA	25	65 x 42 x 41,5	9,20	525	EURO	124 x 85 x 251	203,20
Couvercle à opercule Double lid	BTXTPDA	20	40 x 40 x 77	9,24	360	EURO	80 x 120 x 251	181,32
Chariot Trolley	CAR. BG.	1	86,8 x 45,5 x 48,5	7,76	8	EURO	92 x 120 x 217	77,11



Sanypick S.A

C/ Carlos Jiménez Díaz, 23. ES-28806 Alcalá de Henares (Madrid)
+34 91 884 11 86 · info@sanypick.com
www.sanypick.com