

BioClinic

CONTENEDOR DE MUESTRAS PARA
DIAGNÓSTICO

CONTENTOR DE AMOSTRAS PARA
DIAGNÓSTICO



RESISTENTE
RESISTENTE



SIMPLE
SIMPLES



FIABLE
FIÁVEL



INALTERABLE
INALTERÁVEL



ISO 9001:2008

BioClinic

CONTENEDOR DE MUESTRAS PARA DIAGNÓSTICO
CONTENTOR DE AMOSTRAS PARA DIAGNÓSTICO

INSTRUCCIONES GENERALES 3
INSTRUÇÕES GERAIS

USO CORRECTO 4
USO CORRETO

CONTENEDORES SECUNDARIOS 5
CONTENTORES SECUNDÁRIOS

ACUMULADORES DE FRÍO 6
ACUMULADORES DE FRIO

CARRO 7
CARRO DE TRANSPORTE

DATOS TÉCNICOS 8
DADOS TÉCNICOS

LOGÍSTICA 9
LOGÍSTICA

BioClinic

CONTENEDOR DE MUESTRAS PARA DIAGNÓSTICO CONTENEDOR DE AMOSTRAS PARA DIAGNÓSTICO



APERTURA ABERTURA



Abrir los cierres para separar la tapa del cuerpo

Abrir os fechos para separar a tampa do corpo

INTRODUCCIÓN DE LAS MUESTRAS DE DIAGNÓSTICO EN LOS CONTENEDORES SECUNDARIOS INTRODUÇÃO DE AMOSTRAS DE DIAGNÓSTICO NOS CONTENEDORES SECUNDÁRIOS

2 PERFILES
2 PERFIS



Introducir la gradilla con los tubos
Introduzir o suporte com os tubos

50 TUBOS
50 TUBOS



Cerrar la tapa con el cuerpo y presionar hasta escuchar "clic"
Encerrar o contentor com a tampa e pressionar até ouvir "clic"



Introducir los tubos en el gradilla del contenido
Introduzir os tubos no suporte do contentor



Cerrar la tapa con el cuerpo y presionar hasta escuchar "clic"
Encerrar o contentor com a tampa e pressionar até ouvir "clic"

COLOCACIÓN CONTENEDORES SECUNDARIOS COLOCAÇÃO DOS CONTENEDORES SECUNDÁRIOS



Deberán de colocarse una primera fila de 3 contenedores tal como muestra la imagen y posteriormente podrá introducirse una segunda fila de la misma forma

Deve colocar-se uma primeira fila de 3 contentores, tal como ilustra a imagem, e posteriormente poderá introduzir-se uma segunda fila da mesma forma

COLOCACIÓN ACUMULADORES DE FRÍO - INSERCIÓN COLOCAÇÃO DOS ACUMULADORES DE FRIO - INSERÇÃO



Colocar los acumuladores de frío en el interior de la tapa del contenedor BioClinic. Comprobará que los ha fijado correctamente al escuchar el "clic"

Colocar os acumuladores de frio no interior da tampa do contentor bioclinic. Para comprovar a correta fixação, ouvir um "clic"

EXTRACCIÓN EXTRAÇÃO



Para extraer el acumulador de frío tirar de la pestaña gris de fijación
Para extrair os acumuladores de frio, retirar a patilha cinzenta de fixação

CIERRE ENCERRAMENTO



Alinear la tapa con el cuerpo y fijar los cierres
Alinhar a tampa com o corpo do contentor e fixar os fechos

ETIQUETAS ETIQUETAS



Cumplimentar la información de las etiquetas de emisor y receptor
Complementar as etiquetas com a informação do expedidor e do recetor

BRIDAS DE SEGURIDAD BRAÇADEIRAS DE SEGURANÇA



Para mayor seguridad, puede colocar bridas en los cierres de BioClinic para asegurarse que el contenedor no ha sido abierto durante su transporte

Para maior segurança, podem colocar-se braçadeiras nos fechos do contentor BioClinic, assegurando que o contentor não foi aberto durante o transporte

CARRO CARRO DE TRANSPORTE



TERMÓGRAFO TERMÓGRAFO



BioClinic

CONTENEDOR DE MUESTRAS PARA DIAGNÓSTICO
CONTENEDOR DE AMOSTRAS PARA DIAGNÓSTICO

USO CORRECTO
USO CORRETO



APERTURA
ABERTURA



Abrir los cierres para separar la
tapa del cuerpo

Abrir os fechos para separar a
tampa do corpo

CIERRE
ENCERRAMENTO



Alinear la tapa con el cuerpo y
fijar los cierres

Alinha a tampa com o corpo e
fixar os fechos

⚠ CIERRE DEFINITIVO
ENCERRAMENTO DEFINITIVO



Cumplimentar la información de las
etiquetas de emisor y receptor

Complementar as etiquetas com
informação do expedidor e recetor



Colocar bridas de seguridad en los cierres
para asegurarse que el contenedor no ha
sido abierto durante su transporte

Colocar as braçadeiras de segurança nos
fechos para assegurar que o contenedor
não foi aberto durante o seu transporte

BioClinic

CONTENEDOR DE MUESTRAS PARA DIAGNÓSTICO
CONTENTOR DE AMOSTRAS PARA DIAGNÓSTICO

CONTENEDORES SECUNDARIOS
CONTENTORES SECUNDÁRIOS



2 PERFILES
2 PERFIS



COLOCACIÓN CONTENEDORES SECUNDARIOS
COLOCAÇÃO DOS CONTENTORES SECUNDÁRIOS

Introducir la gradilla con los tubos
Introduzir o suporte com os tubos

Cerrar la tapa con el cuerpo y
presionar hasta escuchar "clic"
*Encerrar a tampa no corpo do
contentor e pressionar até ouvir "clic"*



Deberán de colocarse una primera fila de 3
contenedores tal como muestra la imagen y
posteriormente podrá introducirse una segunda
fila de la misma forma

*Deve colocar-se uma primeira fila de 3
contentores, tal como ilustra a imagem, e
posteriormente poderá introduzir-se uma segunda
fila da mesma forma*

50 TUBOS
50 TUBOS



Introducir los tubos en el gradilla del contenedor
Introduzir os tubos no suporte do contentor

Cerrar la tapa con el cuerpo y
presionar hasta escuchar "clic"
*Encerrar a tampa no corpo do
contentor e pressionar até ouvir "clic"*

BioClinic

CONTENEDOR DE MUESTRAS PARA DIAGNÓSTICO
CONTENTOR DE AMOSTRAS PARA DIAGNÓSTICO

ACUMULADORES DE FRÍO
ACUMULADORES DE FRIO



CONGELADO DE ACUMULADORES DE FRÍO
CONGELAR OS ACUMULADORES DE FRIO



Congelar los acumuladores de frío antes de insertarlos en la tapa

Congelar os acumuladores de frio antes de os inserir na tampa


INSERCIÓN DE ACUMULADORES DE FRÍO
INSERÇÃO DOS ACUMULADORES DE FRIO



Colocar los acumuladores de frío en el interior de la tapa del contenedor Bioclinic. Comprobará que los ha fijado correctamente al escuchar el "clic"

Colocar os acumuladores de frio no interior da tampa do contentor Bioclinic. Para comprovar a correta fixação, ouvir um "clic"

EXTRACCIÓN DE ACUMULADORES DE FRÍO
EXTRAÇÃO DOS ACUMULADORES DE FRIO

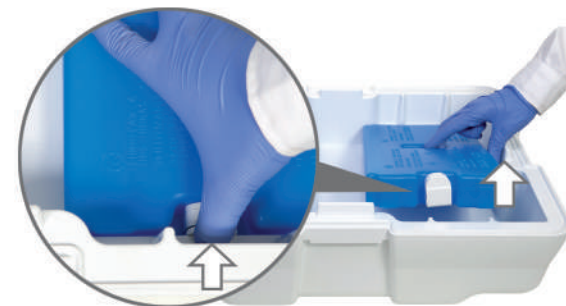

Para extraer el acumulador de frío tirar de la pestaña gris de fijación

Para extrair os acumuladores de frio, retirar a patilha cinzenta de fixação

BioClinic

CONTENEDOR DE MUESTRAS PARA DIAGNÓSTICO
CONTENEDOR DE AMOSTRAS PARA DIAGNÓSTICO

CARRO
CARRO DE TRANSPORTE




1



Desplegar el carro tirando de la base hacia delante

Montar o carro abrindo a base para a frente

2

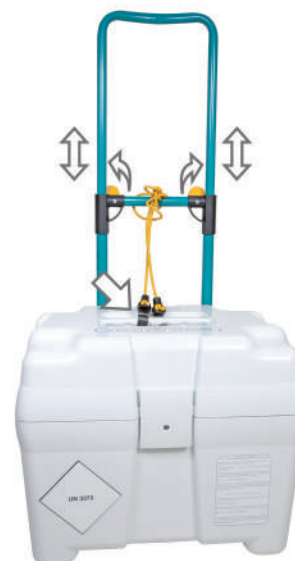

Sacar el asa del carro empujando de ella hacia afuera. Colocar el contenedor Bioclinic II en el carro y colocar el gancho de la cuerda elástica en la parte superior del asa para conseguir una mayor sujeción del mismo al carro

Elevar a pega do carro, puxando-a para fora. Colocar o contentor Bioclinic no carro e colocar o gancho da corda elástica na parte superior da asa do contentor para obter uma maior estabilidade do mesmo no carro

3



El contenedor Bioclinic II está listo para ser transportado mediante su carro con total comodidad

O contentor Bioclinic está pronto para ser transportador com o seu carro com a total comodidade

BioClinic

CONTENEDOR DE MUESTRAS PARA DIAGNÓSTICO
CONTENEDOR DE AMOSTRAS PARA DIAGNÓSTICO



DATOS TÉCNICOS DADOS TÉCNICOS

PRODUCTO PRODUTO	REF. REF.	MEDIDAS MEDIDAS (cm)	PESO UNITARIO PESO UNITARIO (kg)	CAPACIDAD NOM. CAPACIDADE NOM. (l)	CANT. TUBOS DE ENSAYO QUANT. TUBOS DE ENSAIO
BioClinic II	BCLII	50 x 38,3 x 40,4	6	25	300
Carro BioClinic	CAR. BCL	-	-	-	-
Cont. secundario 2 perfiles Cont. secundário 2 perfis	CONT SEC 02	25 x 14 x 10	0,366	-	50
Cont. secundario 50 tubos Cont. secundário 50 tubos	CONT SEC 50	25 x 14 x 10	0,402	-	50
Acumulador GR Acumulador XL	ACU GR	31 x 16 x 4	0,864	-	-

BioClinic

CONTENEDOR DE MUESTRAS PARA DIAGNÓSTICO
CONTENEDOR DE AMOSTRAS PARA DIAGNÓSTICO



LOGÍSTICA

PRODUCTO PRODUTO	REF. REF.	UNID. CAJA UNID. CAIXA	DIMENSIONES CAJA DIMENSÕES DA CAIXA (cm)	PESO CAJA PESO DA CAIXA (kg)	UNID. PALÉ UNID. PALETE	TIPO PALÉ TIPO PALETE	DIMENSIONES PALÉ DIMENSÕES DA PALETE (cm)	PESO PALÉ PESO DA PALETE (kg)
BioClinic II	BCLII	1	51 x 39,5 x 40,5	6	20	EURO	80 x 120 x 230	144
Carro BioClinic	CAR. BCL	1	81 x 50 x 40	5	25	EURO	80 x 120 x 108	120
Cont. secundario 2 perfiles Cont. secundário 2 perfis	CON SEC 02	480	53,55 x 43,5 x 36,5	9	24	USA	100 x 120 x 213	195
Cont. secundario 50 tubos Cont. secundário 50 tubos	CON SEC 50	360	53,55 x 43,5 x 36,5	7	18	USA	100 x 120 x 213	155
Acumulador GR Acumulador XL	ACU GR	20	51 x 39,5 x 41,5	20	-	-	-	-



Sanypick S.A

C/ Carlos Jiménez Díaz, 23. ES-28806 Alcalá de Henares (Madrid)
+34 91 884 11 86 · info@sanypick.com
www.sanypick.com