

BioSecure



+ INTUITIVO

+ ADAPTABLE

+ COMPACTO

+ INNOVADOR



BioSecure



2L



3L



5L



7L



9L



12L

BioSecure



1. Asas ambidiestras
2. Sistema de cierre
3. Boca de entrada de residuos
4. Ubicación de anclaje de tapeta abierta
5. Ubicación de precierre de tapeta
6. Desnivel contenedor de líquidos por caídas accidentales

7. Sistemas de extracción
8. Zonas diseñadas para manipulación de tapeta
9. Tapa principal
10. Bisagra para liberación
11. Dientes cierre definitivo
12. Tapeta

BioSecure



2L

3L

5L

7L

9L


12L

MONTAJE



Presionar las esquinas del contenedor y a continuación presionar los laterales del mismo, hasta escuchar los "clicks" de comprobación

APERTURA

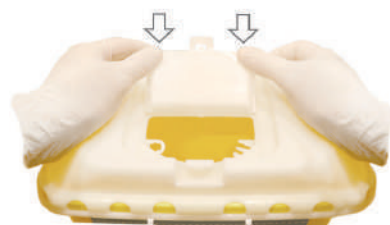

Sujeción de la tapeta en posición de apertura
La tapeta dispone de dos zonas laterales para apoyar los dedos y manipularla

PRE-CIERRE



Abrir la tapeta presionando la lengüeta y llevar la tapeta a su posición de sujeción

CIERRE DEFINITIVO



Llevar la tapeta a posición de precierre y presionar los laterales de la tapeta según indican los círculos dibujados hasta escuchar los "clicks" del cierre

SISTEMAS DE EXTRACCIÓN



Compatible con Vacutainer, Venojet, Insulina y otros sistemas para extraer agujas e instrumental

ASA



Asa para su transporte y/o su sujeción en el soporte de pared


SOPORTES DE BARRA / PARED




El soporte del contenedor se puede colocar en una barra vertical, horizontal o en la pared directamente

BioSecure

SISTEMA DE EXTRACCIÓN

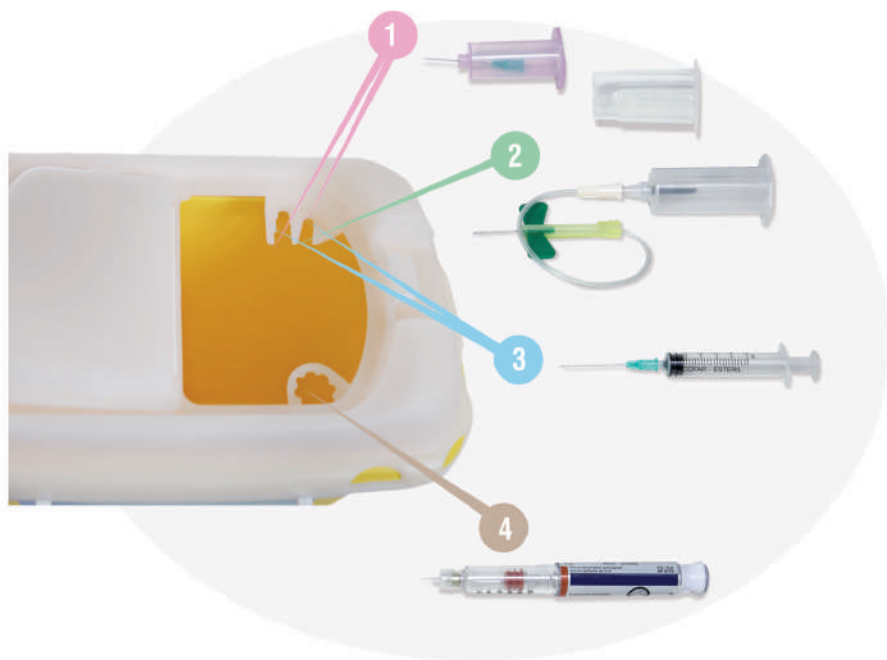

1 COLECTOR DE SANGRE

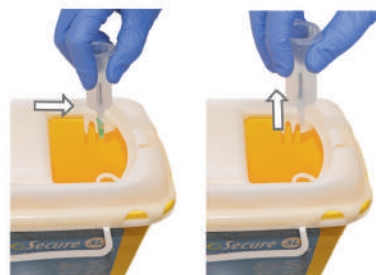

2 PALOMILLA



3 LUER Y LUER LOCK



4 INSULINA



BioSecure

LÍMITE DE LLENADO



LÍMITE DE LLENADO
Línea marcada en el contenedor



NO FORZAR JAMÁS LA INTRODUCCIÓN DE RESIDUOS



NO SOBREPASAR EL 80% DE LA CAPACIDAD ÚTIL



DATOS TÉCNICOS

REF.	CAPACIDAD NOMINAL (l)	CAPACIDAD REAL (l)	PESO (kg)	ANCHO (cm)	LARGO (cm)	ALTURA (cm)	MASA BRUTA MÁX. (kg)
BSC02L	2	1,97	0,15	11,8	19,8	13,06	1,13
BSC03L	3	2,71	0,18	11,8	19,8	18,56	1,47
BSC05L	5	4,12	0,23	19,3	19,3	18,6	3,0
BSC07L	7	6,07	0,31	19,3	19,3	29,4	3,2
BSC09L	9	8,03	0,36	18,8	29,7	21	4,0
BSC12L	12	10,96	0,45	18,8	29,7	29	5,0

REF.	CAPACIDAD NOMINAL (l)	CAPACIDAD REAL (l)	PESO (kg)	ANCHO (cm)	LARGO (cm)	ALTURA (cm)	MASA BRUTA MÁX. (kg)
TAPA BSC T2-3L		NA	0,075	12,25	20,25	3,96	NA
TAPA BSC T5- 7L	NA	NA	0,105	19,87	19,87	3,87	NA
TAPA BSC T9-12L	NA	NA	0,155	20,05	30,35	3,87	NA
SPBABSC			0,06	15,15	0,06	NA	



LOGÍSTICA

PRODUCTO	REF.	UNID. CAJA	DIMENSIONES CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)	UNID. PALÉ	TIPO PALÉ	DIMENSIONES PALÉ (cm)	PESO PALÉ (kg)	PESO PALÉ COMPLETO (kg)
Biosecure 2L	BSC02L	70	40 x 40 x 70	15,40	1260	EURO	120 x 80 x 231	15	293
Biosecure 3L	BSC03L	65	40 x 40 x 70	17,30	1170	EURO	120 x 80 x 226	15	326
Biosecure 5L	BSC05L	60	40 x 40 x 72	21,00	1080	EURO	120 x 80 x 233	15	393
Biosecure 7L	BSC07L	45	40 x 40 x 67	19,60	810	EURO	120 x 80 x 225	15	368
Biosecure 9L	BSC09L	45	60 x 40 x 70	23,17	540	EURO	120 x 80 x 225	15	294
Biosecure 12L	BSC012L	35	60 x 40 x 70	21,10	420	EURO	120 x 80 x 225	15	268

BioSecure

Sanypick S.A

C/ Carlos Jiménez Díaz, 23. ES-28806 Alcalá de Henares (Madrid)
+34 91 884 1 86 · admon@sanypick.com
www.sanypick.com