

BioSecure



+ INTUITIF

+ ADAPTABLE

+ COMPACT

+ INNOVANT



BioSecure



2L



3L



5L



7L



9L



12L



1. Poignées ambidextres
2. Système de fermeture
3. Entrée des déchets
4. Zone de fixation du rabat
5. Zone de fermeture provisoire du couvercle
6. Dénivelé du conteneur pour retenir les liquides en cas de chute accidentelle

7. Systèmes de dématérialisation
8. Zone conçues pour la manipulation du rabat
9. Couvercle principale
10. Languette pour libérer le rabat
11. Encoches de fermeture définitive
12. Rabat




ASSEMBLAGE




Appuyez sur les coins, selon le dessin, et ensuite sur les côtés jusqu'à entendre des « clics » de vérification

OUVERTURE

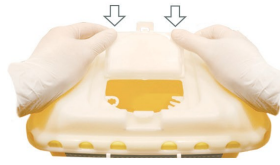


Maintien du rabat en position d'ouverture. Le rabat possède deux zones latérales pour le soutenir et le manipuler avec les doigts

FERMETURE PROVISOIRE

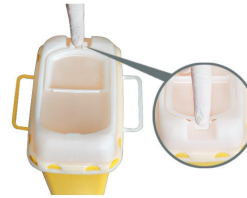

Ouvrez le couvercle en appuyant sur la languette et amenez le rabat en position de maintien

FERMETURE DÉFINITIVE

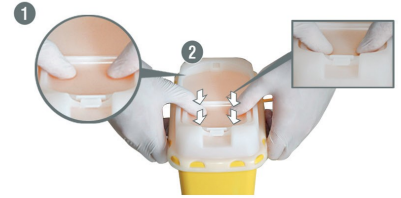

Placez le rabat en position de fermeture provisoire et appuyez avec les pouces sur les empreintes situées sur le couvercle jusqu'à entendre les « clics » de fermeture définitive

SYSTÈME DE DÉMATÉRIALISATION



Compatible avec Vacutainer, Venojet, collecteurs de sang, stylo à insuline et autres systèmes de dématérialisation des aiguilles et instruments

POIGNÉE



Poignée de transport et/ou de fixation au support mural

SUPPORT BARRE/MUR



Le support du conteneur peut être placé sur une barre verticale, horizontale ou directement sur le mur



2L

3L


5L

7L

9L

12L

1 COLLECTEUR DE SANG

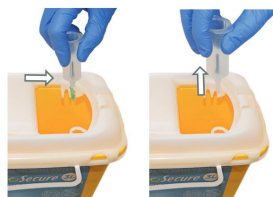


2 PAPILLON



3 LUER ET LUER LOCK



4 STYLO À INSULINE

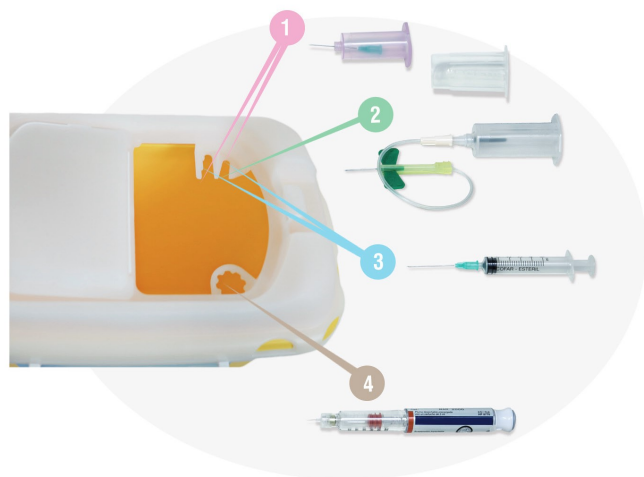

BioSecure

LIMITE DE REMPLISSAGE



LIMITE DE REMPLISSAGE
Ligne gravée sur l'emballage



NE JAMAIS FORCER POUR L'INTRODUCTION DES DÉCHETS



NE JAMAIS DÉPASSER LA LIMITE DE REMPLISSAGE



DONNÉES TECHNIQUES

REF.	CAPACITÉ NOMINALE (l)	CAPACITÉ RÉELLE (l)	POIDS (kg)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	CHARGE MAXIMALE (kg)
BSC02L	2	1,97	0,15	11,8	19,8	13,06	1,13
BSC03L	3	2,71	0,18	11,8	19,8	18,56	1,47
BSC05L	5	4,12	0,23	19,3	19,3	18,6	3,0
BSC07L	7	6,07	0,31	19,3	19,3	29,4	3,2
BSC09L	9	8,03	0,36	18,8	29,7	21	4,0
BSC12L	12	10,96	0,45	18,8	29,7	29	5,0

REF.	CAPACITÉ NOMINALE (l)	CAPACITÉ RÉELLE (l)	POIDS (kg)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	CHARGE MAXIMALE (kg)
TAPA BSC T2-3L		NA	0,075	12,25	20,25	3,96	NA
TAPA BSC T5- 7L	NA	NA	0,105	19,87	19,87	3,87	NA
TAPA BSC T9-12L	NA	NA	0,155	20,05	30,35	3,87	NA
SPBABSC			0,06	15,15	0,06	NA	



LOGISTIQUE

PRODUIT	REF.	QTÉ. CARTON	DIMENSIONS CARTON(cm)	POIDS CARTON(kg)	QTÉ. PALLETTE	TYPE DE PALLETTE	DIMENSIONS PALLETTE(cm)	POIDS PALLETTE (kg)	POIDS PALLETTE COMPLETE(kg)
Biosecure 2L	BSC02L	70	40 x 40 x 72	15,26	1260	EURO	120 x 80 x 231	15	290
Biosecure 3L	BSC03L	65	60 x 40 x 72	17,22	1170	EURO	120 x 80 x 231	15	325
Biosecure 5L	BSC05L	60	40 x 40 x 72	20,34	1080	EURO	120 x 80 x 231	15	381
Biosecure 7L	BSC07L	45	40 x 40 x 70	18,63	810	EURO	120 x 80 x 225	15	350
Biosecure 9L	BSC09L	45	60 x 40 x 72	23,17	540	EURO	120 x 80 x 231	15	293
Biosecure 12L	BSC012L	35	60 x 40 x 72	20,89	420	EURO	120 x 80 x 231	15	266

BioSecure

Sanypick S.A

C/ Carlos Jiménez Díaz, 23. ES-28806 Alcalá de Henares (Madrid)
+34 91 884 1 86 · admon@sanypick.com
www.sanypick.com